


1. Účel a použití

Rychlospojka typ 420 s turbínami typ TGL 637 A, TGL 637 AH a TSL 648 a rychlospojka typ 420 N s turbínami TG 637, TG 637 H představuje nový systém, který umožňuje:


- rychlou výměnu turbín
- otáčení turbíny o 360°
- přenos světla, které vytváří kvalitativně větší předpoklady pro přesnou preparační práci
- racionální využití stejných turbín s různými druhy preparačních nástrojů

2. Technické údaje

Rychlospojka 420 obr. 1 - ukončení 6-ISO Midwest s elektrickými kontakty

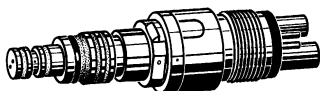

Rychlospojka 420 N obr. 1b - ukončení 4-ISO Midwest - nesvětelná

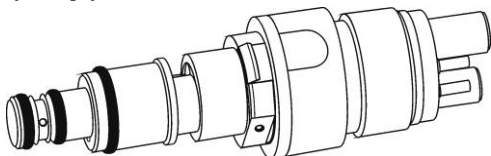

3. Důležité pokyny

Rychlospojka je určená jen pro ošetřování v oblasti stomatology.

4. Základní vybavení


Klíč	1 ks	č. 341 25744
------	------	--------------

5. Náhradní díly


Těsnění	1 ks	č. 741 2569 8 pro R 420
Těsnění	1 ks	č. 741 2510 8 pro R 420 N
"O" kroužek 3,5x1,2	2 ks	č. 3130 4370
"O" kroužek 6,5x0,85	1 ks	č. 741 2535 9

6. Připojení k hadici - obsluha

Rychlospojku na turbínovou hadici přišroubujte pomocí klíče a převlečnou matici pevně utáhněte obr. 2, čímž zamezíte netěsnosti spoje. Touto montáží vznikne spoj pro pohonný vzduch, chladicí vzduch, sprayovou vodu, zpětný vzduch a světlo.

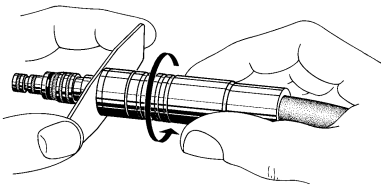

Před prvním nasazením turbíny na rychlospojku je vhodné "O" kroužky zlehka prostříknout SMIOIL sprayem - obr. 3. Jiný mazací prostředek se nedoporučuje. Turbínu potom nasuňte na spojku a směrem dozadu zatlačte až slyšitelně zaklapne.

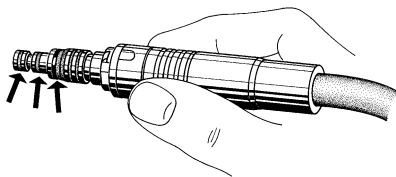

7. Údržba výrobku

7.1. Vnější čištění

Rychlospojku je možné zvenku čistit alkoholovým roztokem.

7.2. Dezinfekce

Povrch rychlospojky doporučujeme dezinfikovat antivirucidními dezinfekčními prostředky působícími i proti viru HIV, t.j. dezinfekce rozprašovací anebo stírací.


Nedoporučuje se rychlospojky do dezinfekčních prostředků ukládat anebo nořit. Nepoužívejte žádné silné alkalické, anebo chlor obsahující dezinfekční prostředky. Rychlospojky nečistěte případně nedezinfikujte v ultrazvukových koupelích.

7.3. Sterilizace

Rychlospojka se nesmí sterilizovat.

7.4. Výměna "O" kroužků

V případě, že na rychlospojce vznikne netěsnost je nutné vyměnit gumové "O" kroužky. Kroužek se prsty vysune z zápichu tak, aby se vzniklá smyčka dala posunout směrem dopředu a kroužek se dal sundat - obr. 4.

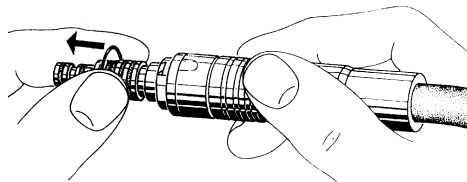

8. Opravy a servis


Zabezpečuje CHIRANA Medical, a.s. anebo autorizované obchodně-servisní organizace.

9. Likvidace přístroje



Po skončení životnosti, přístroj (nářadí) nesmí být likvidovaný s běžným odpadem. Likviduje se s ostatním průmyslovým odpadem, t.j. odděleným sběrem. Oddělený sběr a elektroodpad se odevzdává distributorovi, anebo zpracovateli odpadu pro opětovné použití, anebo recyklaci. Sběr odpadu, t.j. přístroj anebo nářadí zabezpečují distributoři (smluvní servisní organizace, resp. smluvní servisní pracovníci), kteří přístroj (nářadí) odeberou od spotřebitele po vyčištění, předepsané dezinfekci i sterilizaci a odevzdají zpracovateli odpadu, který má souhlas pro nakládání s nebezpečným odpadem.

CHIRANA - tradiční ochranná známka CHIRANY Medical, Stará Turá. Vlastníkem registrovaných ochranných známek CHIRANA je její mateřská společnost M.O.C., s.r.o.

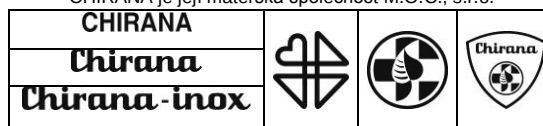

Datum poslední revize – 01/2015



CHIRANA Medical a.s.

Nám. Dr. A. Schweitzera 194
916 01 STARÁ TURÁ, P.O.Box 57
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

TEL.: +421 32/7752257

FAX: +421 32/7753315 +421 32/7752218

medical@chirana.eu

www.chirana.eu

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 13485 =