


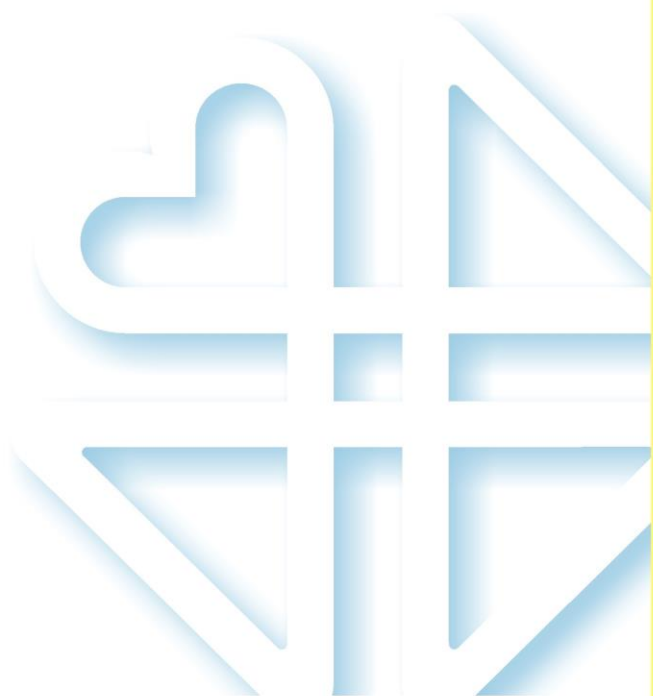

CHIRANA
Medical STARÁ
TURÁ

Stomatologická souprava
CHIRANA CHEESE L

NÁVOD K POUŽITÍ





CHIRANA
Medical STARÁ
TURÁ



CHIRANA MEDICAL a.s., STARÁ TURÁ

Nám. Dr. A. Schweitzera 194
916 01 Stará Turá, P.O.Box 57
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Tel. : 032 - 775 2257

Fax.: 032 - 775 3315
032 - 775 2218

medical@chirana.eu

www.chirana.eu



datum poslední revize – 05/2016

CE 0434

**COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 13485 =**

CHIRANA - tradičná ochranná známka CHIRANY Medical a.s.,
Stará Turá. Vlastníkom registrovaných ochranných znáмок
CHIRANA je jej materská spoločnosť M.O.C., a.s.

CHIRANA			
Chirana			
Chirana-inox			

OBSAH :	Strana
1. Obslužné upozornění.....	5
1.1. Symboly.....	5
1.2. Cílová skupina	5
1.3. Servis	5
1.4. Provozní kniha.....	5
1.5. Záruční podmínky.....	5
2. Účel a použití	6
3. Sestavení a montáž	6
4. Popis výrobku.....	6
4.1. Hlavní části stomatologické soupravy	6
4.1.1. Stolek lékaře	7
4.1.2. Stolek asistenta	8
4.1.3. Plivátkový blok	8
4.1.4. Sloup ramen.....	9
4.1.5. Nožní ovladač.....	10
4.1.6. Hlavice svítidla.....	10
4.1.7. Křeslo	11
4.1.8. Deska	11
4.2. Rozměry stomatologické soupravy	12
4.3. Výrobní štítek	13
4.4. Technické údaje	13
5. Základní vybavení	14
6. Doplnkové vybavení	14
7. Uvedení výrobku do provozu	14
7.1. Zapnutí přístroje	14
7.2. Zapnutí svítidla	15
8. Obsluha výrobku	15
8.1. Manipulace se stolem lékaře.....	15
8.2. Manipulace se stolem asistenta.....	16
8.3. Manipulace s křeslem.....	16
8.3.1. Manuální režim	17
8.3.2. Programový režim	17
8.3.3. Nastavení programových poloh křesla	18
8.3.....	19
8.4. Popis funkcí ovládaných tlačítka na klávesnicích	19
8.4.1. Základní funkce.....	19
8.4.2. Doplnkové funkce	21
8.4.4. Programování	21
8.5. Ovládání nástrojů na stolem lékaře	22
8.5.1. Vícefunkční stříkačka.....	22
8.5.2. Turbínový násadec	22
8.5.3. Mikromotor	23
8.5.4. Ultrazvukový odstraňovač zubního kamene	24
8.5.5. Pneumatický odstraňovač zubního kamene	24
8.5.6. Polymerizační lampa	25
8.5.7. Cyklus dezinfekce nástrojových hadic	25
8.6. Ovládání nástrojů na stolem asistenta.....	26
8.6.1. Odsliňovač.....	26
8.6.2. Odsávačka	26
8.6.3. Vícefunkční stříkačka.....	26

8.6.4. Polymerizační lampa	26
8.7. Multimedia.....	26
8.8. Systém odsávání a separace odpadu a amalgámu	26
8.8.1. Ovládací panel plivátkového ventilu Dürr MSBV	27
8.8.2. Ovládací panel separátoru amalgámu Metasys Compact Dynamic	27
8.8.3. Ovládací panel separátoru amalgámu Dürr CAS1	27
8.9. Plnění lahví pro čistou vodu a dezinfekční prostředek.....	27
8.10. Popis akustických upozornění.....	28
9. Údržba výrobku.....	29
9.1. Údržba obsluhujícím personálem	29
10. Čištění, dezinfekce a sterilizace	30
11. Bezpečnostně technické kontroly.....	31
12. Doprava	31
13. Skladování.....	32
14. Likvidace přístroje.....	32
15. Údaje k elektromagnetické kompatibilitě podle STN EN 60 601-1-2	33
15.1. Elektromagnetické emise	33
15.2. Elektromagnetická odolnost vůči rušení.....	33
15.3. Doporučené ochranné vzdálenosti mezi mobilními vysokofrekvenčními telekomunikačními přístroji a stomatologickou soupravou CHIRANA CHEESE L	34

1. Obslužné upozornění

1.1. Symboly



VÝSTRAHA

Tímto symbolem jsou v návodu k použití označené upozornění, které vyžadují zvláštní pozornost. Před prvním použitím výrobku se seznamte se všemi upozorněními popsanými v tomto návodu!



Tímto symbolem jsou v návodu k použití označené další důležitá upozornění

1.2. Cílová skupina

Tento návod k použití je určený pro stomatology a personál stomatologické ordinace.



Části stomatologické soupravy, které přicházejí do styku s pacientem, lékařem a obslužným personálem nejsou karcinogenní, mutagenní, toxické a neobsahují ftaláty.

1.3. Servis

Jméno a adresu organizace, která vykoná opravu přístroje si vyžádejte od dodavatele přístroje.



Při prodeji výrobku od původního uživatele k jinému uživateli je nevyhnutelné oznámit změnu uživatele dodavateli přístroje, resp. výrobcí.

1.4. Provozní kniha

Kniha určená pro záznamy o instalaci, opravách a pravidelných kontrolách.



Do provozní knihy by měl být zaznamenán každý úkon vykonaný servisním technikem.

1.5. Záruční podmínky

CHIRANA Medical, a. s. zaručuje, že její výrobky budou správně fungovat a nebudou vykazovat chyby materiálu, ani zpracování po dobu záruky uvedené v záručním listu.

V případě oprávněných reklamací se plní závazky podle smlouvy bezplatnou opravou, anebo výměnou. Ostatní nároky jakéhokoli druhu, zvláště pokud se týkají náhrad škod, jsou vyloučené. CHIRANA Medical, a. s. nezodpovídá za žádné chyby a jejich následky, způsobené přirozeným opotřebením, nesprávným zacházením, čištěním, údržbou, nedodržením návodu k použití a montáže, vápenatěním, anebo korozi, znečištěním částicemi obsaženými ve vzduchu, anebo ve vodě a chemickými, anebo elektrickými vlivy, které jsou neobvyklé, anebo nepřípustné podle návodu k použití a podle dalších pokynů.

Záruka se všeobecně nevztahuje na žárovky, skleněné a gumové součástky a na stálost barev součástek z plastů.

Jakákoliv zodpovědnost výrobce je vyloučená, pokud chyby, anebo jejich následky byli způsobené zasahováním do výrobku, anebo upravováním výrobku osobou, která k tomu nemá pověření od firmy CHIRANA Medical, a. s.

Zodpovědnost výrobce a dodavatele za technický stav stomatologické soupravy je vyloučená, pokud údržba, opravy a modifikace nebyly vykonávány s použitím výhradně originálních náhradních dílů.

K dodržení bezpečnosti obsluhy a pacienta a funkčnosti a spolehlivosti tohoto zařízení musí být používáno pouze originální příslušenství. Jakékoliv použití neautorizovaného příslušenství a komponentů ruší platnost záruky.

Záruční reklamáce mohou být posuzované jen v tom případě, když je předložený doklad o nákupu výrobku ve formě kopie faktury, dodacího listu, anebo záručního listu. Doklad musí obsahovat označení prodejce (distributora), datum předání, typové označení a výrobní číslo.

2. Účel a použití

Stomatologická souprava CHIRANA CHEESE L je určena výhradně pro použití v oblasti stomatologie. Obsluhovat ji může jen kvalifikovaný zdravotnický personál.



VÝSTRAHA

Souprava je určena do nevýbušného prostředí.

3. Sestavení a montáž

Sestavení a montáž stomatologické soupravy CHIRANA CHEESE L může vykonávat servisní pracovník CHIRANA Medical, a. s. Stará Turá a servisní pracovníci organizací společností, které mají oprávnění vykonávat uvedenou činnost. Sestavení a montáž se vykonává podle návodu na sestavení a montáž CHIRANA CHEESE L a podle instalačního plánu CHIRANA CHEESE L.

Stomatologická souprava CHIRANA CHEESE L je klasifikovaná podle typu ochrany před úrazem el. proudu jako výrobek třídy I. a může být instalována jen v místnostech, kde elektrické rozvody vyhovují požadavkům STN 33 2000-7-710 případně národním normám.

Zařízení může obsluhovat jen pracovník obeznámený s tímto návodem k použití.



VÝSTRAHA

- Pro zamezení rizika úrazu elektrickým proudem musí být tento přístroj připojený k napájecí síti s ochranným uzemněním.



VÝSTRAHA

- Při připojení IT přístroje k stomatologické soupravě dodržujte normu EN60601-1-1




VÝSTRAHA

- Když národní předpisy vyžadují separaci amalgámu, potom stomatologická souprava s plivátkovým blokem bez systému separace amalgámu musí být připojena k externímu separátoru amalgámu.

4. Popis výrobku

Stomatologická souprava CHIRANA CHEESE L sestává z navzájem funkčně propojených částí. Provedení a vybavení jednotlivých částí se může lišit podle provedení a vybavení stomatologické soupravy.

4.1. Hlavní části stomatologické soupravy

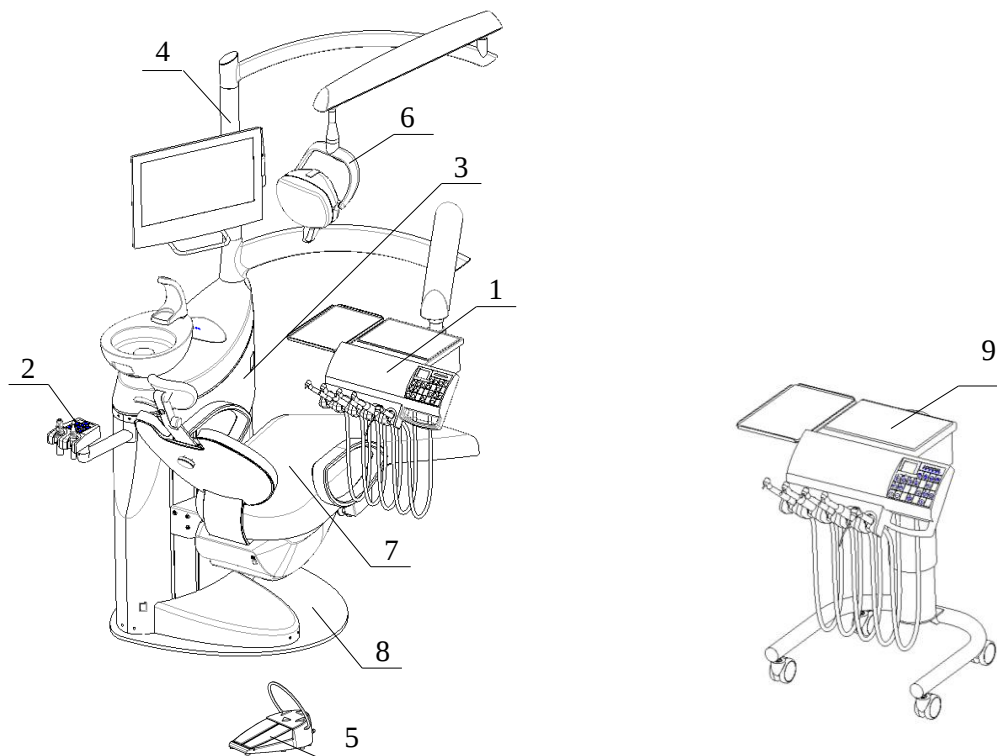

1. Stolek lékaře na pantografickém rameni
2. Stolek asistenta
3. Plivátkový blok
4. Sloup ramen
5. Nožní ovladač
6. Hlavice svítidla
7. Křeslo
8. Deska
9. Pojízdný stolek lékaře




Některé části stomatologické soupravy jsou volitelné zákazníkem a proto se mohou odlišovat od zobrazených obrázků.

4.1.1. Stolek lékaře


Stolek lékaře nesený na pantografickém rameni může být v provedení s dolním vedením nástrojových hadic, anebo s horním vedením nástrojových hadic. Pojízdný stolek má vždy dolní vedení hadic.

4.1.1.1. Stolek lékaře – dolní vedení

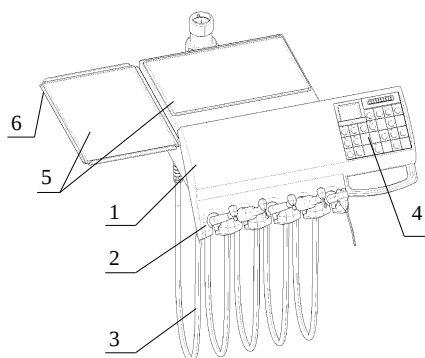

1. Stolek lékaře
2. Držáky nástrojů
3. Hadice nástrojů
4. Klávesnice s negatoskopem
5. Tácek tray stolku
6. Boční tray stolek

4.1.1.2. Stolek lékaře – horní vedení

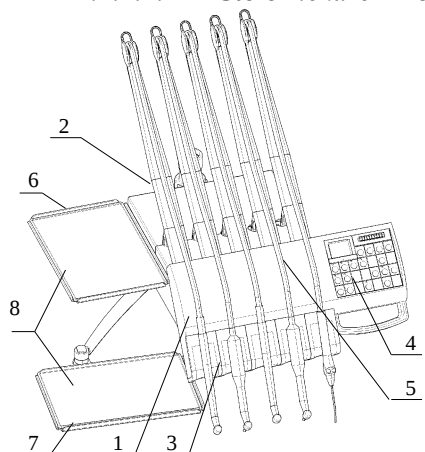

1. Stolek lékaře
2. Horní vedení (bič)
3. Lůžko
4. Klávesnice s negatoskopem
5. Hadice nástrojů
6. Boční tray stolek
7. Tray stolek s ramínkem
8. Tácek tray stolku

Stolek lékaře může obsahovat od jednoho do pěti nástrojů z následující nabídky:


- 1x vícefunkční stříkačka
- 2x turbínový násadec, anebo 1x turbínový násadec a 1x pneumatický odstraňovač zubního kamene
- 2x mikromotor komutátorový
- 2x mikromotor bezkomutátorový, spolu však maximálně 3 mikromotory
- 1x ultrazvukový odstraňovač zubního kamene
- 1x polymerizační lampa

Pořadí nástrojů na stolku lékaře může být libovolné - závisí od objednávky.

4.1.2. Stolek asistenta


Stolek asistenta má dvě varianty: stolek asistenta pro 1-2 nástroje a stolek asistenta pro 1-4 nástroje. Stolek asistenta může být uchycený na otočném rameni, na dvojitém otočném rameni, anebo na otočném výškově nastavitelném rameni.

4.1.2.1. Stolek asistenta pro 1 – 2 nástroje

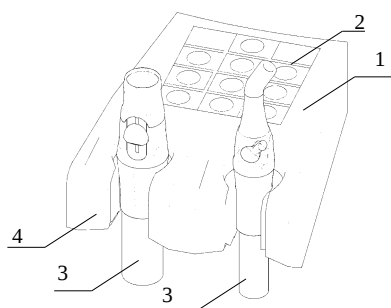

1. Stolek asistenta
2. Klávesnice asistenta
3. Hadice nástrojů
4. Držáky nástrojů

4.1.2.2. Stolek asistenta pro 1- 4 nástroje

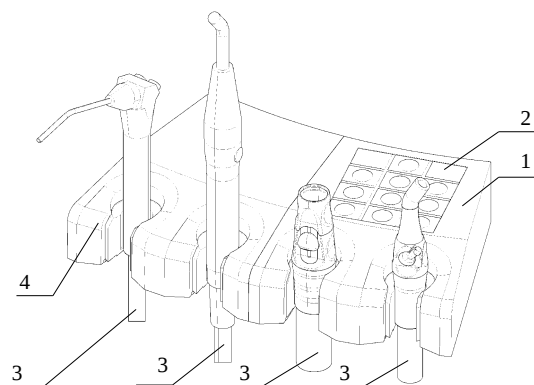

1. Stolek asistenta
2. Klávesnice stolku asistenta
3. Hadice nástrojů
4. Držáky nástrojů


Stolek asistenta může obsahovat od jednoho do čtyř nástrojů z následující nabídky:

- 2x odsliňovač
- 1x odsávačka
- 1x vícefunkční stříkačka
- 1x polymerizační lampa

4.1.3. Plivátkový blok

Plivátkový blok má vícero provedení z hlediska vnitřního vybavení.


Provedení pro ejektorové odsávání, mokré odsávání, suché odsávání bez separace amalgámu a suché odsávání se separací amalgámu. Plivátkový blok může dále obsahovat systém čisté vody a systém dezinfekce vodních cest nástrojových hadic.

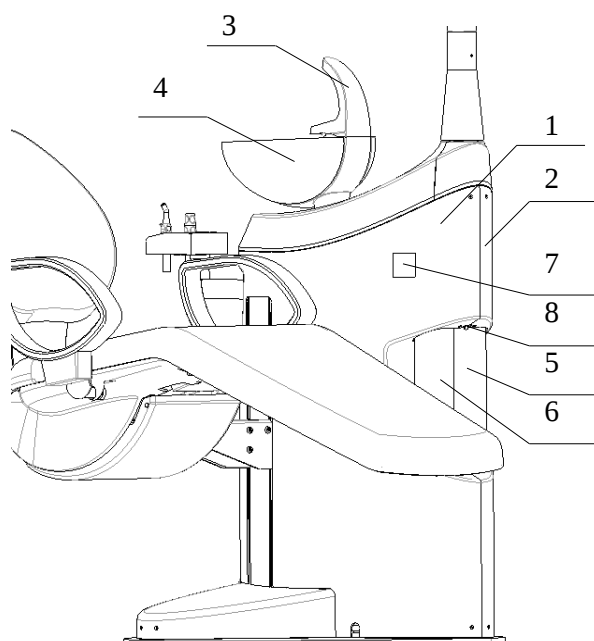

1. Kryt levý
2. Kryt pravý
3. Plnič poháru s oplachem mísy
4. Plivátková mísa
5. Flaška s čistou vodou pro chlazení nástrojů
6. Flaška s dezinfekčním prostředkem pro dezinfekci vodních cest nástrojových hadic
7. Ovládací panel systému mokrého odsávání, anebo systému separace amalgámu
8. Odvzdušňovací ventil lahvi

4.1.3.1. Plivátková mísa


Plivátková mísa je otočná. Plivátková mísa a plnič poháru s oplachem mísy jsou odnímatelné.

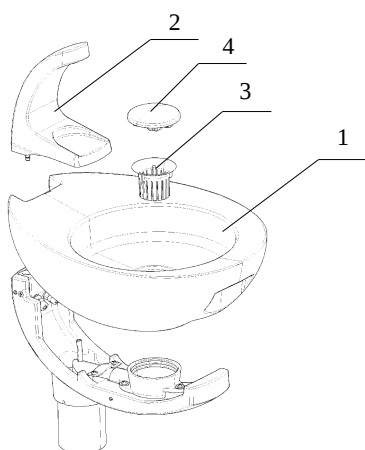


1. Plivátková mísa
2. Plnič poháru s oplachem mísy
3. Zachytávač
4. Krytka sítka

4.1.4. Sloup ramen

Sloup ramen může mít maximálně tři ramena.

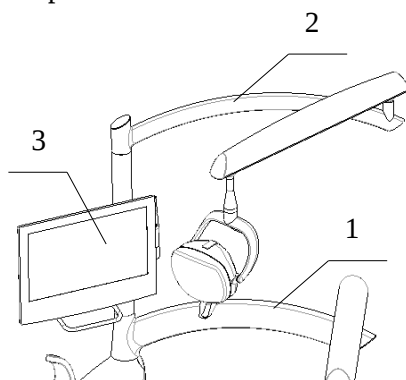


1. Rameno stolu lékaře
2. Rameno svítidla

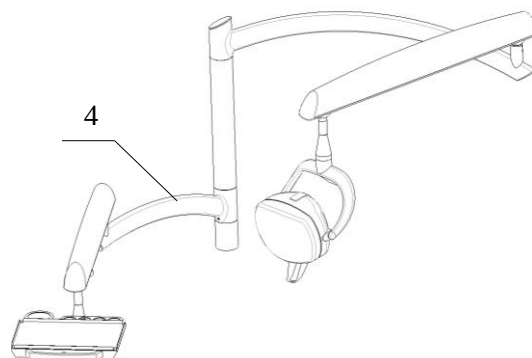


3. Rameno monitoru s monitorem
4. Rameno tray stolu


4.1.5. Nožní ovladač

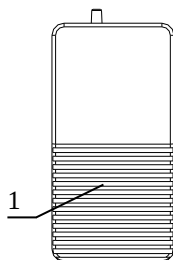


Nožní spínač bez tlačítek

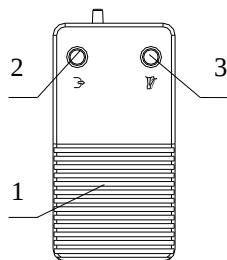


Nožní spínač s tlačítky

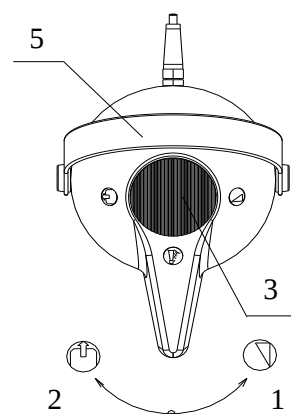

Nožní ovladač otočný

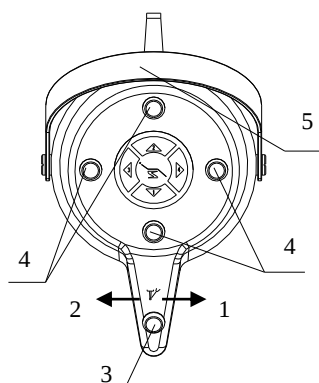

Nožní ovladač multifunkční otočný

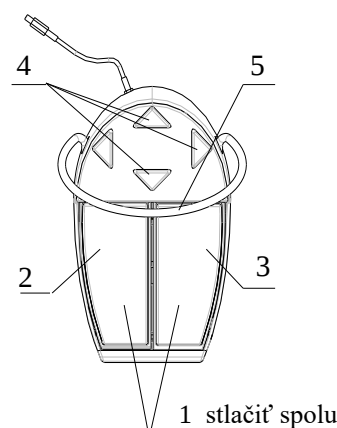


Nožní ovladač multifunkční pedálový

1. Spuštění nástroje
2. Vyfukování přes nástroj
3. Chlazení nástroje


4. Ovládání křesla
5. Nosič

4.1.6. Hlavice svítidla

Hlavice svítidla jsou dodávány ve třech provedeních: Halogénové svítidlo FARO EDI, anebo LED svítidla FARO ALYA a FARO MAIA.

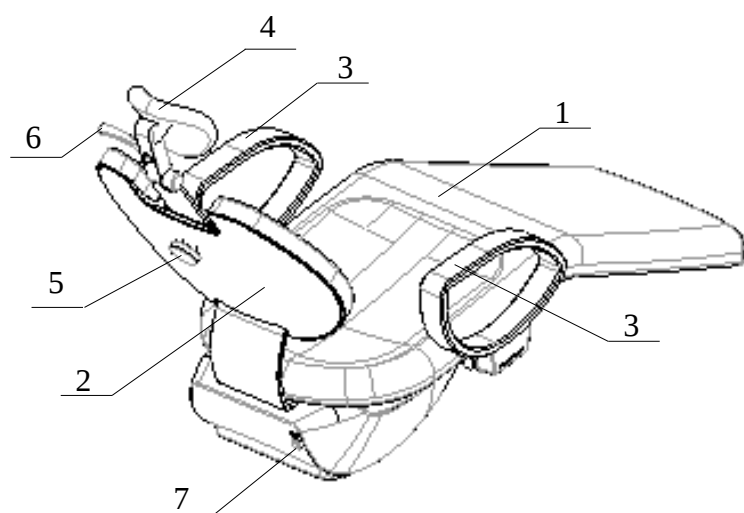4.1.7. Křeslo


1. Sedadlo
2. Opěradlo zad
3. Opěradlo ruky
4. Opěradlo hlavy
5. Zajišťovací kolečko opěradla hlavy
6. Zajišťovací páka opěradla hlavy
7. Programovací tlačítko
8. Zajišťovací páčka opěradla hlavy
9. Display s programovacím tlačítkem PROG a tlačítkem USER na výběr uživatele

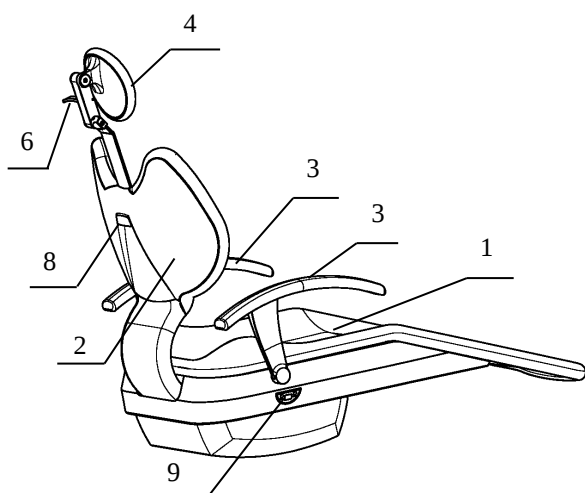


Křeslo může mít více provedení týkajících se počtu opěradel rukou a typu opěradla zad.

4.1.8. Deska


Deska slouží jako rozšířená základna pro zvýšení stability stomatologické soupravy. Její použití se doporučuje v stomatologických ordinacích, kde není možné dostatečně fixovat stomatologickou soupravu k podlaze.

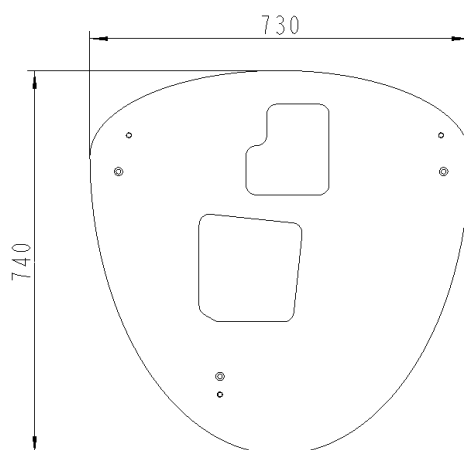


4.2. Rozměry stomatologické soupravy

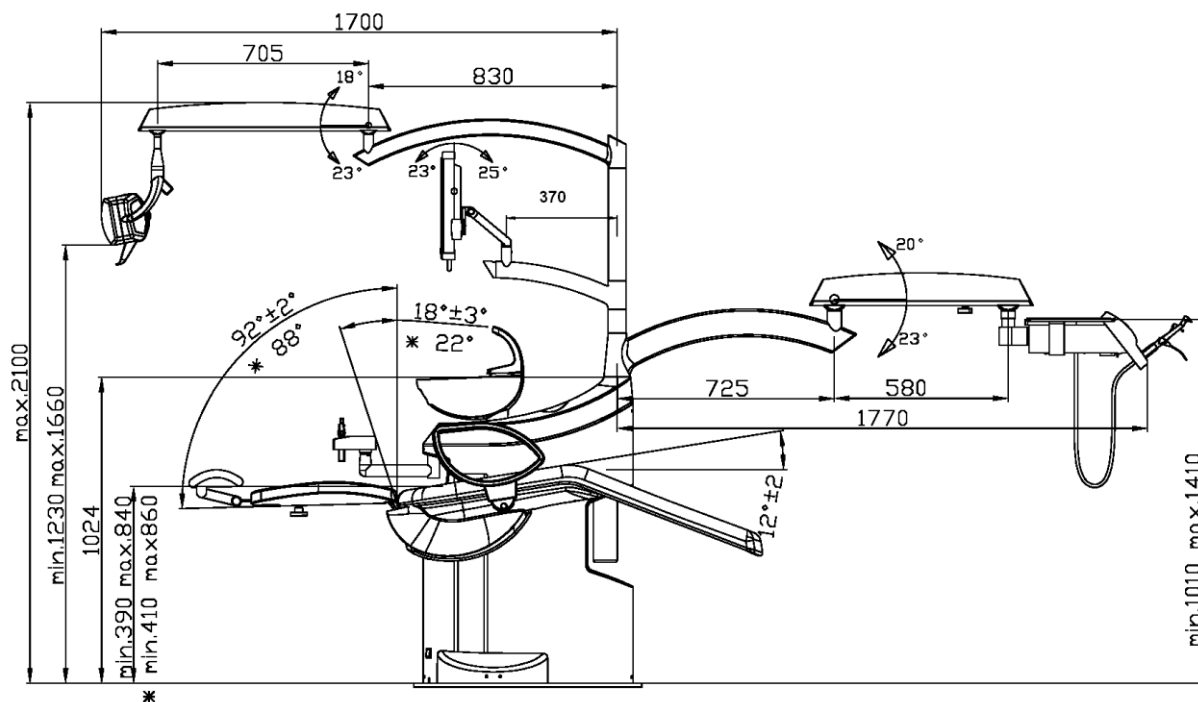

* údaje pro křeslo SK1-08

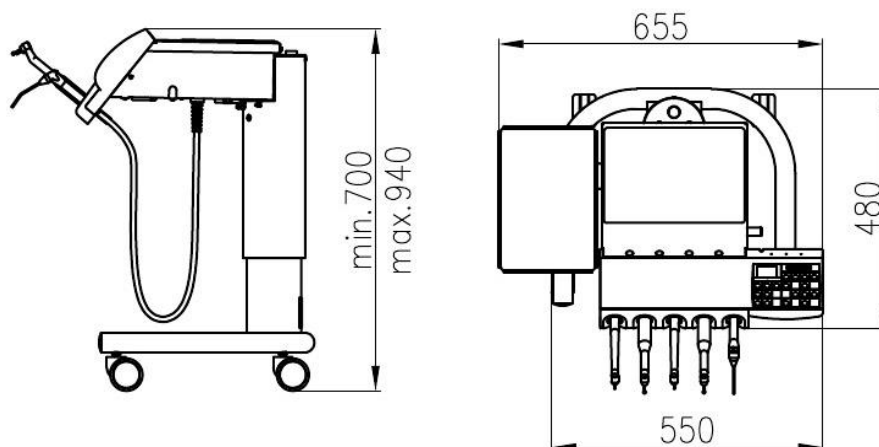

4.3. Výrobní štítek

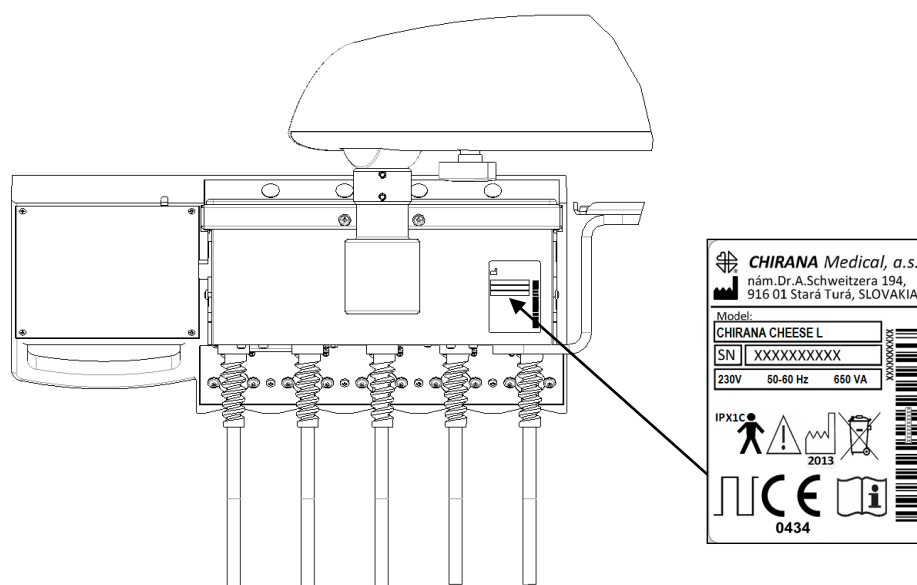

Výrobce

S/N

Výrobní číslo

IPX1C

Stupeň ochrany krytím



Klasifikace typu B



Seznamte se s upozorněními uvedenými v návodu k použití



20xx

Rok výroby



Přístroj nesmí být likvidován s běžným odpadem

Doba provozu křesla 30 s
Doba pauzy křesla 4,5 min.

Značka CE podle směrnice 93/42/EHS pro zdravotnické prostředky s číslem notifikované osoby



Dodržujte návod k použití

4.4. Technické údaje

Jmenovité napájecí napětí

230V~, 220V~ (110V~) ± 10 %

Jmenovitá frekvence

50 - 60 Hz ± 2 %

Max. příkon při 50 Hz

650 VA

Vstupní tlak vzduchu

0,5 MPa (+0,2 ; -0,03) MPa

Atmosferický tlak

70,0 kPa do 106,0 kPa

Vstupní tlak vody

0,6 MPa (-0,3) MPa

Tvrdost vody

od 8,4 dH do 12 dH

Teplota vody na vstupu

< 25°C

Teplota vody pro pohár (při ohřevu vody)	40°C (-10)°C
Teplota okolí	+10°C ÷ +40°C
Relativní vlhkost vzduchu	30 % ÷ 75 %
Stupeň ochrany před úrazem el. proudem	B 
Typ ochrany před úrazem el. proudem (pevná instalace)	I
Stupeň krytí	IP X1C
Hmotnost bez desky	200 kg ± 10 %
Hmotnost s deskou	240 kg ± 10 %
Max. zatížení křesla	150 kg
Max. přídavné zatížení stolku lékaře	2 kg
Max. přídavné zatížení tray stolku na sloupu	3 kg
Minimální poloha křesla	390 mm, *410 mm
Maximální poloha křesla	840 mm, *860 mm
Rozsah zdvihu opěradla hlavy	165 mm

* údaje pro křeslo SK1-08

5. Základní vybavení

Základní vybavení a náhradní díly dodávané s přístrojem jsou uvedené v Balícím listě.



VÝSTRAHA

- Nemodifikujte tuto soupravu bez oprávnění výrobce
- V případě modifikace, po rozhodnutí výrobce, musí být vykonané příslušné prohlídky a zkoušky pro zajištění trvalé bezpečnosti použití stomatologické soupravy
- Používejte jen náhradní díly od firmy CHIRANA Medical, a. s.


6. Doplnkové vybavení

Doplnkové vybavení dodávané s přístrojem je obsažené v části Balícího listu jako příslušenství dodávané s přístrojem na zvláštní objednávku.

7. Uvedení výrobku do provozu

7.1. Zapnutí přístroje

Stomatologická souprava se zapíná stlačením hlavního vypínače do polohy I.

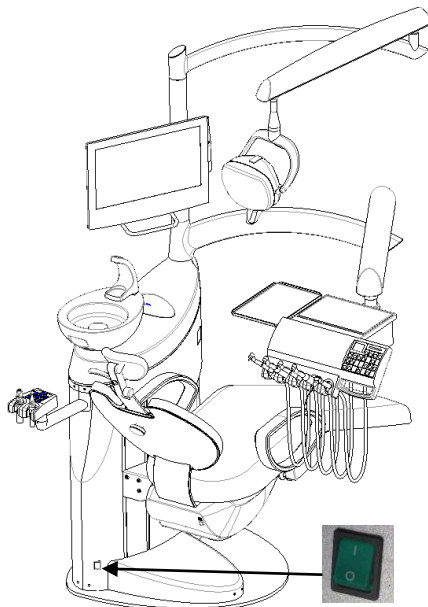

Po zapnutí stomatologické soupravy se po dobu 4 sekund testují obvody soupravy.

Jako první jsou otestované obvody křesla. Po úspěšném testu se ozve jeden akustický signál. Testování dále pokračuje testováním stolku lékaře. Součástí testů je i testování klávesnice lékaře, což se projeví rozsvícením všech indikačních prvků na dobu 2 sec. a jejich následným zhasnutím na dobu 2 sec. Po úspěšném testu stolku lékaře se ozve druhý akustický signál (cca 3 sekundy po prvním) a na indikační stupnici se rozsvítí LED dióda na pozici Ø. Souprava je připravená k činnosti.

Pokud se neozvou dva akustické signály, volejte vašemu servisnímu techniku.



VÝSTRAHA

Po skončení práce je nutné stlačit hlavní vypínač do polohy O, čímž se uzavře přívod vzduchu, vody a elektrické energie do soupravy.

Doporučuje se vždy uzavírat i hlavní přívod vody k stomatologické soupravě.

7.2. Zapnutí svítidla

Svítidlo se zapíná tlačítkem na klávesnici lékaře anebo klávesnicí asistenta a ovláda se spínačem (u senzorového provedení senzorem) na spodní části tělesa svítidla. Svítidlo má svůj vlastní návod k použití.



VÝSTRAHA

Světelnou stopu svítidla je nutné nastavovat do prostoru ústní dutiny, čím se eliminuje riziko poškození zraku pacienta.

8. Obsluha výrobku



8.1. Manipulace se stolem lékaře

Vertikální poloha stolku lékaře umístěného na pantografickém rameni je fixovaná brzdou. Při mechanickém zatížení tray stolku tak nedochází k samovolnému klesání stolku. Před změnou vertikální polohy stolku lékaře je potřebné brzdu uvolnit. Mechanická brzda se uvolňuje otáčením kolečka umístěného na spodní straně ramene lékaře. Pneumatická brzda se uvolňuje stlačením tlačítka umístěného v rukověti stolku lékaře




VÝSTRAHA


Stolek lékaře nenastavujte do požadované polohy taháním za hadice nástrojů.

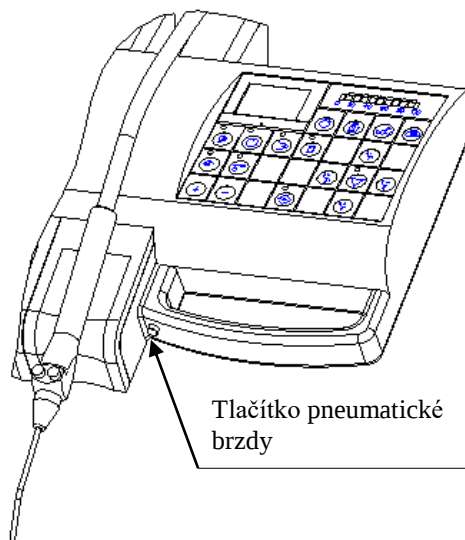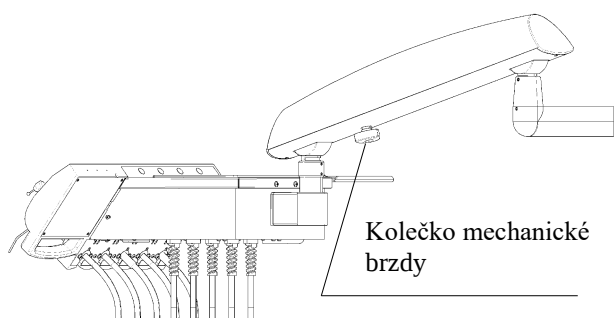

Nastavení výšky pojízdného stolku lékaře :

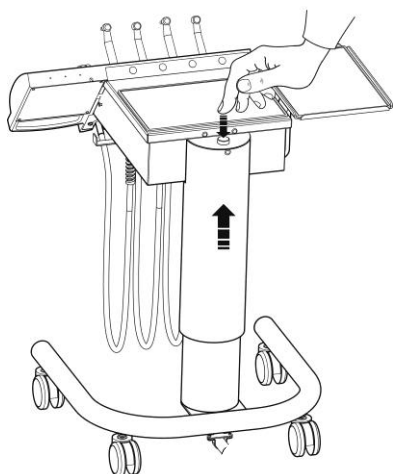


Pro zvýšení polohy stolku lékaře stlačte tlačítko prstem. Stolek se sám začne zdvíhat.

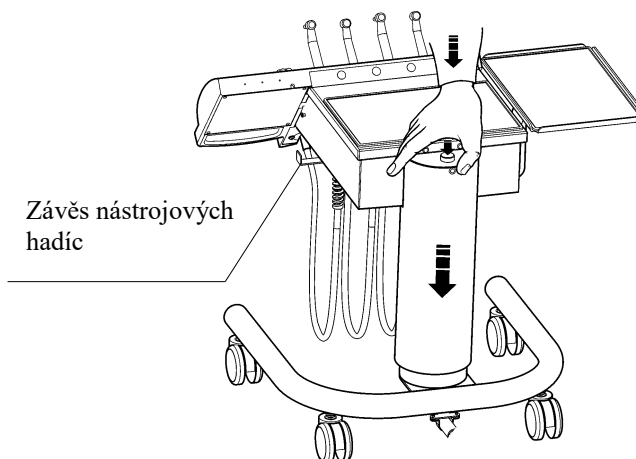

Pro snížení polohy stolku lékaře stlačte tlačítko dlaní a stolek stlačte do požadované polohy. Před uvedením stolku do nejnižší (parkovací) polohy zavěste hadice na závěs hadic.

8.2. Manipulace se stolkem asistenta

Vertikální poloha stolku asistenta uchyceného na otočném výškově nastavitelném rameni se nastavuje v pěti polohách pohybem ramene zespodu směrem nahoru. Pohyb ramene směrem dolů je zablokován aretací, aby nedocházelo k samovolnému klesání stolku. Pro nastavení stolku do nižší polohy je nutné stolek nejdříve zdvihnout na doraz do nejvyšší polohy (nad polohou 5 podle obr.), čím se vypne aretace a z této nejvyšší polohy rukou spustit stolek na doraz do nejnižší polohy (poloha 1 podle obr.), čím se aretace znova zapne. Z této nejnižší polohy je opět možné pohybem směrem nahoru zdvihnout stolek do jedné ze čtyř dalších aretovaných poloh (polohy 2-5).

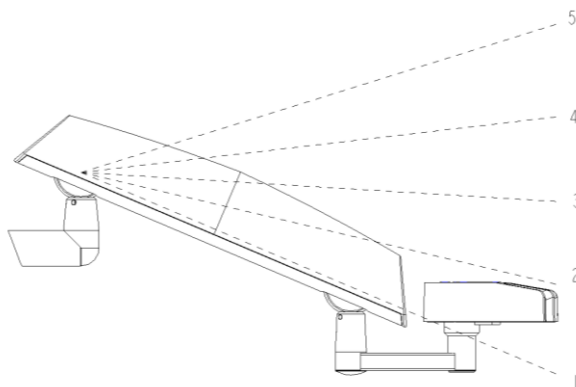

8.3. Manipulace s křeslem



VÝSTRAHA

Při pohybu křesla dbejte na to, aby nic nestálo v dráze pohybu křesla a opěradla zad!



Plivátková mísa je otočná v rozsahu cca 180°. Při natočení plivátkové mísy nad křeslo je pohyb křesla směrem nahoru od určité polohy blokován, aby nedošlo ke kolizi křesla nebo pacienta s plivátkovou mísou.

Nastavení opěradla hlavy a pravého opěradla ruky se provádí mechanicky.

Podle provedení křesla se nastavená výška opěradla hlavy zajišťuje buď zajišťovacím kolečkem opěradla hlavy nebo zajišťovací páčkou opěradla hlavy viz obr. v kapitole 4.1.7. Před nastavením výšky opěradla hlavy uvolněte zajištění otočením zajišťovacího kolečka opěradla hlavy proti směru hodinových ručiček, resp. potáhnutím zajišťovací páčky opěradla hlavy směrem k sobě.

Sklon opěradla hlavy se jistí zajišťovací pákou opěradla hlavy. Před nastavením sklonu uvolněte zajištění potáhnutím zajišťovací páky opěradla hlavy směrem nahoru viz obr. 4.1.7.

Pravé opěradlo ruky je otočné směrem dozadu (proti směru hodinových ručiček). V horní poloze je opěradlo ruky aretované. Ke sklopení opěradla dozadu je potřebné překonat určitou sílu aretace.

Levé opěradlo ruky je připevněno pevně.

Nastavení výšky křesla a sklonu opěradla zad se vykonává motoricky v manuálním nebo programovém režimu.

Ovládání křesla je stejné z klávesnice lékaře, z klávesnice asistenta a také z multifunkčního nožního ovládače.

8.3.1. Manuální režim

Při manuálním ovládání je požadovaný pohyb křesla vyvolán stlačením tlačítka s příslušným symbolem (viz kap. 8.4.1). Pohyb probíhá po celý čas stlačení tlačítka. Zastavení každého pohybu nastane po uvolnění tlačítka. V krajních polohách se všechny pohyby zastaví, i když obsluha drží tlačítko stlačené.

8.3.2. Programový režim

Křeslo SK1-08 obsahuje dvě sady programů pro dva uživatele. V každé sadě jsou 4 programy. Pro výběr uživatele slouží tlačítko USER (viz obr. v kap. 4.1.7.)

Křeslo SK1-01 obsahuje jen jednu sadu programů.

Spuštění programu se vykoná krátkým zatlačením jednoho ze čtyř tlačítek ovládání křesla (viz kap. 8.4.1), čím se vyvolá jeden ze čtyř programů. Křeslo se pohybuje, dokud nedosáhneme naprogramovanou polohu.

program č. 4 slouží k uvedení křesla do vyplachovací polohy. Při opětovném vyvolání programu č. 4 se křeslo vrátí z vyplachovací polohy do předcházející pracovní polohy.

Pohybující se křeslo může být kdykoliv zastavené stlačením bezpečnostního tlačítka STOP



Křeslo obsahuje bezpečnostní spínače, které způsobí, že:

- pohyb křesla se automaticky zastaví, když se při pohybu křesla směrem dolů dostane překážka pod spodní kryt křesla. Elektronika zabrání dalšímu pohybu křesla směrem dolů a automaticky vykoná krátký pohyb směrem nahoru, aby se mohla odstranit překážka.
- pohyb opěradla zad a křesla se automaticky zastaví, když se při sklápění opěradla zad nebo při pohybu křesla s vyklopeným opěradlem směrem dolů dostane překážka pod opěradlo zad. Elektronika zabrání dalšímu pohybu směrem dolů a automaticky vykoná krátký pohyb směrem nahoru, aby se mohla odstranit překážka.

Křeslo SK1-08 obsahuje display, na kterém se zobrazuje údaj o vykonávaném pohybu, případně stavová informace:

U1 – (user1) uživatel 1

U2 – (user2) uživatel 2

cd - (chair down) pohyb křesla dolů

cu - (chair up) pohyb křesla nahoru

bd - (backrest down) pohyb opěradla zad dolů
 bu - (backrest up) pohyb opěradla zad nahoru

P1 – pohyb do programové polohy 1
 P2 – pohyb do programové polohy 2
 P3 – pohyb do programové polohy 3
 SP - (spit position) pohyb křesla do vyplachovací polohy
 LP - (last position) pohyb křesla do poslední polohy

cS – (chair switch) aktivovaný bezpečnostní spínač spodního krytu křesla
 bS – (backrest switch) aktivovaný bezpečnostní spínač opěradla zad
 SA – (safety) automatický krátký pohyb směrem nahoru po aktivování bezpečnostního spínače

uS – (unit switch) plivátková mísa otočená nad křeslo

Er – (Error) – porucha
 Er 13 – křeslo dosáhlo horní krajní polohu
 Er 22, Er 23 – opěradlo zad dosáhlo jednu z krajních poloh
 Když se zobrazuje jiné než výše uvedené číslo poruchy, volejte svého servisního technika.

8.3.3. Nastavení programových poloh křesla

Před nastavením programových poloh zvolte s pomocí tlačítka USER jednoho ze dvou uživatelů U1 nebo U2 (platí pouze pro křeslo SK1-08 - viz obr. v kap. 4.1.7.).

Křeslo uveďte do požadované polohy. Stlačte programovací tlačítko umístěné na křeslu (ne na klávesnici lékaře) a během držení tohoto tlačítka stlačte jedno ze čtyř ovládacích tlačítek křesla na klávesnici lékaře, klávesnici asistenta nebo na nožním ovládači. Ozve se akustický signál informující, že programová poloha byla naprogramována. Tímto způsobem se programují všechny čtyři programové polohy, přičemž se doporučuje:


- Programovou polohu č.1 použít jako základní (nastupovací) polohu
- Programovou polohu č.2 použít jako pracovní polohu
- Programovou polohu č.3 použít jako pracovní polohu
- Programovou polohu č.4 použít jako vyplachovací polohu

Před programováním pracovních poloh doporučujeme manuální obsluhou přivést křeslo do inicializační polohy, t.j. křeslo do nejnižší možné polohy a opěradlo zad do nejvyšší možné polohy (v každé poloze se ozve krátký akustický signál).




8.4. Popis funkcí ovládaných tlačítka na klávesnicích

Klávěsnice lékaře

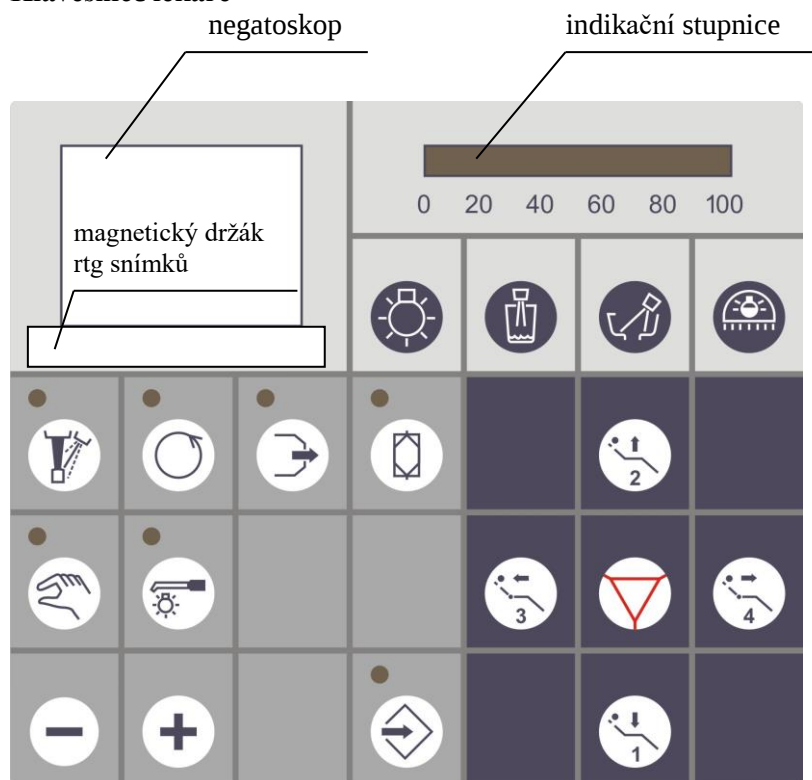

Klávesnice asistenta

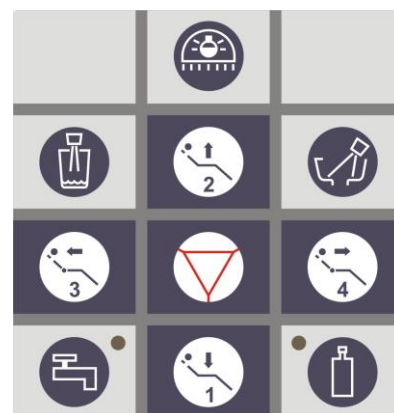

8.4.1. Základní funkce



Zapnutí / vypnutí chlazení nástroje

Když svítí signalizace, je chlazení zapnuté. Chlazení nástroje je možné zapnout a vypnout i pomocí nožního ovladače.



Reverzace otáček mikromotoru, (ENDO funkce ultrazvukového odstraňovače zubního kamene)

Když svítí signalizace, jsou nastavené levotočivé otáčky mikromotora. U některých typů ultrazvukových odstraňovačů se tímto tlačítkem zapíná funkce ENDO



Zapnutí / vypnutí automatického vyfukování přes nástroj

Když je tato funkce zapnutá (svítí signalizace), po každém zastavení otáček dojde ke krátkému vyfouknutí vzduchu přes nástroj.



Spuštění cyklu dezinfekce nástrojových hadic

Volitelná výbava

Viz kap. 8.5.7



Ruční regulace otáček/ výkonu

Když svítí signalizace, je nastavená ruční regulace otáček mikromotoru / výkonu ultrazvukového odstraňovače zubního kamene pomocí tlačítek + a - v rozsahu od 1% do 100%. Když signalizace nesvítí, je navolená plynulá regulace nožním ovladačem. Při tomto způsobu regulace je možné pomocí tlačítek + a - nastavit maximální otáčky mikromotoru / maximální výkon ultrazvukového odstraňovače zubního kamene v rozsahu od 20% do 100%.



Zapnutí / vypnutí osvětlení světelného nářadí

Funkce osvětlení je časovaná. Když nástroj není v činnosti déle jako je nastavený čas automatického vypnutí, osvětlení nástroje se vypne. Nastavení času automatického vypnutí osvětlení nástroje je popsáno v kapitole „Programování“.

**Snižování nastavované hodnoty****Zvyšování nastavované hodnoty****Tlačítko programování**

Parametry, které je možné programovat, jsou popsány v kapitole „Programování“.

**Zapnutí / vypnutí negatoskopu**

Když je negatoskop zapnutý déle než 5 min., automaticky dojde k jeho vypnutí.

**Zapnutí / vypnutí plnění poháru**

Funkce je časovaná - automaticky dojde k vypnutí.

Nastavení času plnění poháru je popsáno v kapitole „Programování“.

**Zapnutí / vypnutí oplachu mísy**

Funkce je časovaná - automaticky dojde k vypnutí.

Nastavení času oplachu mísy je popsáno v kapitole „Programování“.

**Zapnutí / vypnutí svítidla**

Svítidlo je možné zapínat tlačítkem na klávesnici, anebo spínačem (senzorem) na spodní části hlavice svítidla. Když se rozhodnete zapínat svítidlo tlačítkem na klávesnici, spínač na svítidle musí být trvale zapnutý. Naopak, když upřednostňujete zapínat svítidlo spínačem na svítidle, tlačítkem na klávesnici musíte svítidlo dopředu zapnout.

**Bezpečnostní tlačítko STOP**

Stlačením tlačítka se zastaví jakýkoliv pohyb křesla.

Po dobu práce lékaře s nástrojem je křeslo blokováno automaticky



Pohybující se křeslo je též možné kdykoliv zastavit stlačením jednoho ze čtyř tlačítek pro ovládání křesla.

**Pohyb křesla dolů**

Držením tlačítka se ovládá pohyb křesla směrem dolů. Krátkým stlačením tlačítka se vyvolá program č.1.

**Pohyb křesla nahoru**

Držením tlačítka se ovládá pohyb křesla směrem nahoru. Krátkým stlačením tlačítka se vyvolá program č.2.

**Pohyb opěrky dolů**

Držením tlačítka se ovládá pohyb opěrky zad směrem dolů. Krátkým stlačením tlačítka se vyvolá program č.3.

**Pohyb opěrky nahoru**

Držením tlačítka se ovládá pohyb opěrky zad směrem nahoru. Krátkým stlačením tlačítka se vyvolá program č.4, opětovným krátkým stlačením se křeslo vrátí do poslední pracovní polohy.

8.4.2. Doplňkové funkce

Měření času práce rotačních nástrojů s indikací potřeby ošetření nástroje přípravkem SMIOIL.

Funkce zabezpečuje měření skutečného času práce rotačního nástroje a po dosažení doby, kdy je potřebné nástroj ošetřit (20 min práce nástroje), je tento stav indikován blikajícím údajem na indikační stupnici. Po každém zdvihnutí neošetřeného nástroje z držáku se ozve akustický signál.

Vynulování indikace po ošetření nástroje přípravkem SMIOIL

 ^{3s} Nástroj vyberte z držáku, stlačte a po dobu 3s podržte tlačítko chlazení nástroje (ozve se akustický signál). Indikace potřeby ošetření nástroje se vynuluje a začne se nové měření času práce nástroje.

Zapnutí/vypnutí funkce

vyberte daný nástroj z držáku, stlačte a po dobu 3s podržte spolu následující dvě tlačítka (ozve se akustický signál):

 ^{3s} &  Zapnutí funkce (pro každý nástroj samostatně)

 ^{3s} &  Vypnutí funkce (pro každý nástroj samostatně)

Přepínání zdroje vody pro chlazení nástrojů (volitelná výbava)



centrální (městský) rozvod

Když svítí signalizace je zvolený centrální (městský) zdroj vody



flaška s čistou vodou


Když svítí signalizace je zvolený zdroj vody z flašky

8.4.4. Programování

Nastavení množství chladicí vody

Nastavuje se pro každý nástroj osobně.

Vyberte nástroj z držáku, stlačte tlačítko programování (svítí červená signalizace) a následně (do 5 sek.) stlačte tlačítko chlazení nástroje. Pomocí tlačítek + a - nastavte množství chladicí vody v rozsahu 0 – 100%. Nový nastavený údaj uložte do paměti stlačením tlačítka programování. Ozve se akustický signál a zhasne červená signalizace.

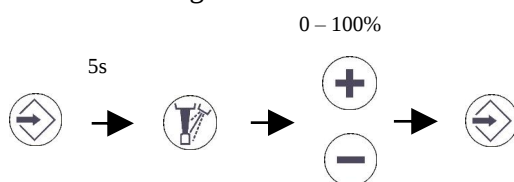

Když stomatologická souprava neobsahuje elektronickou regulaci chladicí vody, potom je možné tímto způsobem nastavit jen dvě hodnoty:
0% - voda vypnutá 100% - voda zapnutá.

Nastavení času automatického vypnutí osvětlení nástrojů

Nastavuje se pro všechny nástroje společně.

Vyberte z držáku jeden ze světelných nástrojů a stlačte a podržte tlačítko osvětlení světelného nástroje po dobu, kterou chceme naprogramovat. Po uvolnění tlačítka se ozve akustický signál a nový čas automatického vypnutí osvětlení nástroje se zapíše do paměti. Minimální čas nastavení je 3 sek.

3 – 20s



Nastavení času plnění poháru

Stlačte a podržte tlačítko plnění poháru po dobu, kterou chceme naprogramovat. Po uvolnění tlačítka se ozve akustický signál a nový čas plnění poháru se zapíše do paměti. Minimální čas nastavení je 3 sek.

3 – 60s

**Nastavení času oplachu misy**

Stlačte a podržte tlačítko oplachu misy po dobu, kterou chceme naprogramovat. Po uvolnění tlačítka se ozve akustický signál a nový čas oplachu misy se zapíše do paměti. Minimální čas nastavení je 3 sek.

3 – 60s

**8.5. Ovládání nástrojů na stolku lékaře**

Nástroje umístěné na stolku lékaře (kromě vícefunkční stříkačky) jsou programově blokovány proti současnému použití.

Jen první vytažený nástroj je připravený k provozu. Všechny ostatní po něm vytažené nástroje jsou blokovány.

8.5.1. Vícefunkční stříkačka

Stříkačku vytáhněte z držáku, resp. zdvihněte z lůžka.

Pro spuštění vzduchu stlačte tlačítko modré barvy. Pro spuštění vody stlačte tlačítko zelené barvy. Pro spuštění vodní mlhoviny stlačte současně modré a zelené tlačítko.

8.5.2. Turbínový násadec

VÝSTRAHA

Dodržujte návod k používání, který je přiložený k balení turbínového násadce

Turbínový násadec aktivujte vytažením z držáku, resp. zdvihnutím z lůžka.

Pro spuštění činnosti turbínového násadce stlačte nožní spínač, resp. vychylte páku nožního ovladače otočného doprava. U nožního ovladače multifunkčního pedálového stlačte současně pravou a levou část pedálu. Uvolněním nožního ovladače se činnost ukončí. Velikost a směr otáček turbínového násadce není možné nastavovat.

Pro vyfukování vzduchu přes nástroj stlačte levé tlačítko nožního spínače s tlačítky, resp. vychylte páku nožního ovladače otočného doleva. U nožního ovladače multifunkčního pedálového stlačte levou část pedálu.

Pro nastavení funkcí turbínového násadce je možné použít tlačítka na klávesnici lékaře:




Chlazení nástroje sprejem je možné zapnout a vypnout i nožním ovladačem.

Pro zapnutí resp. vypnutí chlazení nožním ovladačem stlačte pravé tlačítko nožního spínače s tlačítky, resp. stlačte tlačítko chlazení nástroje nožního ovladače otočného. U nožního ovladače multifunkčního pedálového stlačte pravou část pedálu. Zapnutí chlazení je signalizované rozsvícenou signalizací při tlačítku chlazení na klávesnici lékaře.

Nastavení množství chladicí vody:

- Když je souprava v provedení s mechanickou regulací chladicí vody, potom se množství chladicí vody nastavuje knoflíkem umístěným ze spodní strany stolku lékaře.

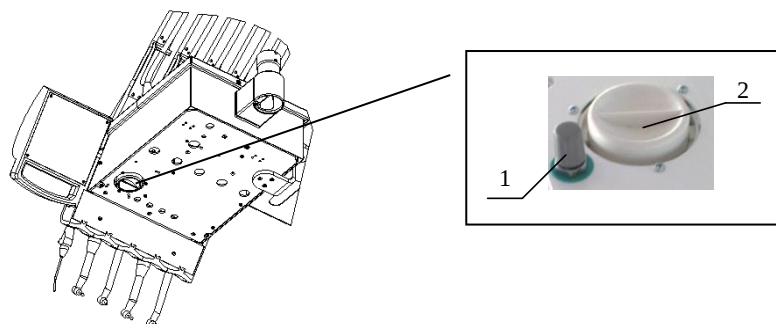

1. Knoflík mechanické regulace chladicí vody
2. Zachytávač oleje



V základním vybavení je jeden společný regulátor pro nastavení množství vody do všech nástrojů (kromě vícefunkční stříkačky). V závislosti od vybavení může souprava obsahovat i samostatné mechanické regulátory množství vody pro každý nástroj zvlášť.

- když je souprava v provedení s elektronickou regulací chladicí vody, potom se množství vody nastavuje pro každý nástroj zvlášť postupem popsaným v kapitole programování.

8.5.3. Mikromotor



VÝSTRAHA

Dodržujte návod k používání, který je přiložený k balení mikromotoru

Mikromotor aktivujte vytažením z držáku, resp. zdvihnutím z lůžka.

Pro spuštění činnosti mikromotoru stlačte nožní spínač, resp. vychylte páku nožního ovladače otočného doprava. U nožního ovladače multifunkčního pedálového stlačte současně pravou a levou část pedálu. Uvolněním nožního ovladače se činnost ukončí. Velikost a směr otáček mikromotoru je možné nastavovat tlačítky klávesnice lékaře, anebo nožním ovladačem.

Pro vyfukování vzduchu přes nástroj stlačte levé tlačítko nožního spínače s tlačítky, resp. vychylte páku nožního ovladače otočného doleva. U nožního ovladače multifunkčního pedálového stlačte levou část pedálu.

Pro nastavení funkcí mikromotoru je možné použít tlačítka na klávesnici lékaře:



Chlazení nástroje sprejem je možné zapnout a vypnout i nožním ovladačem.

Pro zapnutí resp. vypnutí chlazení nožním ovladačem stlačte pravé tlačítko nožního spínače s tlačítky, resp. stlačte tlačítko chlazení nástroje nožního ovladače otočného. U nožního ovladače multifunkčního pedálového stlačte pravou část pedálu. Zapnutí chlazení je signalizované rozsvícenou signalizací při tlačítku chlazení na klávesnici lékaře.

Množství chladicí vody se nastavuje stejně jako u turbínového násadce.



Otáčky mikromotoru je možné regulovat plynule nohou jen pomocí nožních ovladačů. Nožními spínači je možné otáčky mikromotora jen zapnout, resp. vypnout. Nastavení otáček je možné vykonat pomocí tlačítek klávesnice lékaře.




Minimální, resp. maximální počet otáček vrtáčku závisí na použitém mikromotoru a mikromotorickém násadci.



U bezkomutátorového mikromotoru není možné vypnout osvětlení nástroje. Osvětlení je zapnuté po celou dobu aktivace mikromotoru.

Giromatic

Funkce při které se nástroj v násadci mikromotoru cyklicky otáčí doprava a doleva. Úhel otáčení (kmitání) nástroje se nastavuje tlačítky + a - v rozsahu od $\pm 60^\circ$ po $\pm 100^\circ$. Funkce se zapíná následovně:

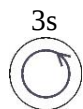

Mikromotor vyberte z držáku, stlačte a podržte tlačítko reverzace mikromotoru po dobu 3 sek.



Funkce je aktivní jen pro komutátorový mikromotor.

8.5.4. Ultrazvukový odstraňovač zubního kamene

VÝSTRAHA

Odstraňovač nepoužívejte u pacientů s kardiostimulátorem, může dojít k ovlivnění funkce stimulátoru.

Jakékoliv aplikace s odstraňovačem mají být považované za chirurgický zákrok.

Odstraňovač není určený pro použití na operačních sálech.

Nesmí se používat ve výbušném prostředí.



VÝSTRAHA

Dodržujte návod k použití, který je přiložený k balení odstraňovače.

Odstraňovač aktivujete vytažením z držáku, resp. zdvihnutím z lůžka.

Pro spuštění činnosti odstraňovače stlačte nožní spínač, resp. vychylte páku nožního ovladače otočného doprava. U nožního ovladače multifunkčního pedálového stlačte současně pravou a levou část pedálu. Uvolněním nožního ovladače se činnost ukončí. Výkon odstraňovače je možné nastavovat tlačítky klávesnice lékaře, anebo nožním ovladačem. Nožním spínačem je možné odstraňovač jen zapnout, resp. vypnout.

Pro nastavení funkcí odstraňovače je možné použít tlačítka na klávesnici lékaře:



Chlazení koncovky vodou je možné zapnout a vypnout i nožním ovladačem.

Pro zapnutí resp. vypnutí chlazení nožním ovladačem stlačte pravé tlačítko nožního spínače s tlačítky, resp. stlačte tlačítko chlazení nástroje a nožního ovladače otočného. U nožního ovladače multifunkčního pedálového stlačte pravou část pedálu. Zapnutí chlazení je signalizované rozsvícenou signalizací při tlačítku chlazení na klávesnici lékaře.

Množství chladicí vody se nastavuje stejně jako u turbínového násadce.

U některých typech odstraňovačů je možné tlačítkem  zapnout funkci ENDO.

8.5.5. Pneumatický odstraňovač zubního kamene

VÝSTRAHA

Dodržujte návod k použití, který je přiložený k balení odstraňovače.

Pneumatický odstraňovač aktivujete vytažením z držáku, resp. zdvihnutím z lůžka.

Pro spuštění činnosti pneumického odstraňovače stlačte nožní spínač, resp. vychylte páku nožního ovladače otočného doprava. U nožního ovladače multifunkčního pedálového stlačte současně pravou a levou část pedálu. Uvolněním nožního ovladače se činnost ukončí. Výkon pneumického odstraňovače není možné nastavovat.

Pro nastavení funkcí pneumického odstraňovače je možné použít tlačítka na klávesnici lékaře:



Množství chladicí vody se nastavuje stejně jako u turbínového násadce.

8.5.6. Polymerizační lampa

Pro spuštění činnosti polymerizační lampy stlačte tlačítko na tělesu lampy. Pro ukončení činnosti stlačte tlačítko dvakrát. Různé typy dodávaných polymerizačních lamp mají různé světelné režimy. Řiďte se podle instrukcí v návodu k použití, který je přiložený k balení polymerizační lampy.



VÝSTRAHA

Intenzita světla polymerizační lampy je velmi vysoká, proto je třeba chránit zrak proti přímému pohledu do zdroje světla.


8.5.7. Cyklus dezinfekce nástrojových hadic

(Volitelná výbava)

Cyklus dezinfekce nástrojových hadic se skládá ze tří kroků:

- plnění vodních cest nástrojových hadic dezinfekčním prostředkem – indikováno narůstáním indikačního sloupce na indikační stupnici zleva doprava.
- samotná dezinfekce je indikován blikajícím údajem na indikační stupnici.
- vypuštění dezinfekčního prostředku a propláchnutí nástrojových hadic vodou – indikováno zmenšováním indikačního sloupce na indikační stupnici zprava doleva.

Před spuštěním dezinfekčního cyklu vložte do plivátkové mísy dezinfekční držák. Do otvorů dezinfekčního držáku zasuněte minimálně dvě nástrojové hadice (bez nástrojů). Pokud je souprava v provedení s mechanickou regulací chladicí vody, knoflíkem (knoflíky) regulace chladicí vody nastavte maximální chlazení. Pokud jsou v provedení s elektronickou regulací chladicí vody, maximální chlazení se nastaví automaticky.

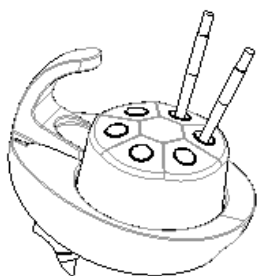

K spuštění dezinfekčního cyklu stlačte tlačítko  a podržte ho stlačené do zapnutí trojitého akustického signálu (3s). Signalizace při tlačítku dezinfekce začne blikat a bude blikat po celou dobu probíhající dezinfekce.

Ve druhém kroku dezinfekčního cyklu můžete stomatologickou soupravu vypnout.

Dezinfekční prostředek zůstane v nástrojových hadicích napuštěn a bude působit po celou dobu nečinnosti soupravy. Po zapnutí soupravy se dezinfekční cyklus automaticky dokončí třetím krokem.

Pokud stomatologickou soupravu nevypnete, druhý krok dezinfekčního cyklu se po 3,5 min. sám ukončí a cyklus přejde automaticky k třetímu kroku.

Dezinfekce vícefunkční stříkačky:

Dezinfekční cyklus do procesu dezinfekce nezahrnuje vícefunkční stříkačku na stolku lékaře ani na stolku asistenta. Stříkačky je třeba během dezinfekčního cyklu dezinfikovat manuálně. Během prvního nebo druhého kroku dezinfekčního cyklu (před vypnutím soupravy) naplňte vodní cestu stříkaček dezinfekčním prostředkem stlačením zeleného tlačítka na dobu minimálně 10 s. Trysku stříkačky položte do otvoru dezinfekčního držáku. Po ukončení dezinfekčního cyklu opět manuálně vypusťte dezinfekční prostředek ze stříkaček stlačením zeleného tlačítka na dobu minimálně 10 s.



Dezinfekční cyklus není možné spustit samostatně pro jeden nástroj – musí být dezinfikovány minimálně dva nástroje.

Cyklus dezinfekce není možné předčasně ukončit.

Během dezinfekčního cyklu je normální činnost nástrojů blokována.

8.6. Ovládání nástrojů na stoleku asistenta

8.6.1. Odsliňovač

Uvádí se do činnosti automaticky po vytažení koncovky z držáku. Po vložení koncovky do držáku se činnost odsliňovače ukončí.

Sací výkon odsliňovače je možné regulovat regulační klapkou umístěnou na koncovce hadice. Touto klapkou je možné odsávání úplně zastavit.

8.6.2. Odsávačka

Uvádí se do činnosti automaticky po vytažení koncovky z držáku. Po vložení koncovky do držáku se činnost odsávačky ukončí. Sací výkon odsávačky je možné regulovat regulační klapkou umístěnou na koncovce hadice. Touto klapkou je možné odsávání úplně zastavit.



Když souprava obsahuje separační systém Cattani, potom při dlouhodobém odsávání může docházet ke krátkému přerušení odsávání. Toto je normální stav. Pokud koncovka odsávačky, anebo odsliňovače zůstane vytažená z držáku, odsávání se po několika sekundách automaticky obnoví.

Po vložení koncovky odsliňovače anebo odsávačky zpět do držáku je odsávání ukončené se zpožděním. Zpoždění může trvat několik sekund.



Při odsávání krve, hlenu a různých sanitačních prostředků vzniká pěna, která může způsobit zahlcení separačního systému CATTANI a dlouhodobé přerušení odsávání. Pro zamezení vzniku pěny vložte do filtru odsávacích hadic (viz obr. v kap. 9.1.) 1 čisticí a protipěnovou tabletu CATTANI a před použitím odsliňovače, anebo odsávačky nasajte malé množství vody. Tableta se rozpouští několik hodin. Čisticí a protipěnové tablety CATTANI mají kromě protipěnového účinku i antibakteriální účinek.

8.6.3. Vícefunkční stříkačka

Stříkačku vytáhněte z držáku.

Pro spuštění vzduchu stlačte tlačítko modré barvy. Pro spuštění vody stlačte tlačítko zelené barvy. Pro spuštění vodní mlhoviny stlačte současně modré a zelené tlačítko.

8.6.4. Polymerizační lampa

Pro spuštění činnosti polymerizační lampy stlačte tlačítko na tělesu lampy. Pro ukončení činnosti stlačte tlačítko dvakrát. Různé typy dodávaných polymerizačních lamp mají různé světelné režimy. Řiďte se podle instrukcí v návodu k použití, který je přiložený k balení polymerizační lampy.



VÝSTRAHA

Intenzita polymerizační lampy je velmi vysoká a proto je potřebné chránit zrak proti přímému pohledu do zdroje světla.

8.7. Multimédia


Monitor, který se dodává se soupravou, má vlastní návod k použití. Jiné typy monitorů je možné použít pouze po odsouhlasení a dohodě s výrobcem.

Intraorální kamera má vlastní návod k použití.

8.8. Systém odsávání a separace odpadu a amalgámu

V závislosti od provedení může stomatologická souprava obsahovat různé systémy odsávání a separace odpadu, resp. separace amalgámu. Některé z nich mají svůj ovládací panel umístěný na plivatkovém bloku.


8.8.1. Ovládací panel plivátkového ventilu Dürr MSBV

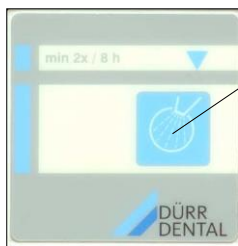

1. Tlačítko pro spuštění čistící automatiky. Spustit 1x denně po skončení práce.

Plivátkový ventil Dürr MSBV zabezpečuje odsávání odpadu z plivátkové mísy u souprav zapojených k centrálnímu mokrému odsávání. Kompletní informace najdete v samostatném návodu k použití.

8.8.2. Ovládací panel separátoru amalgámu Metasys Compact Dynamic

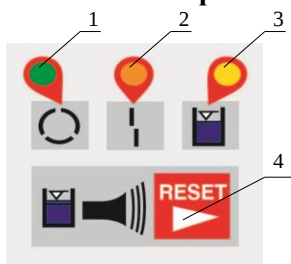


1. Provozní pohotovost (zelená dióda)
2. Porucha zařízení (oranžová dióda)
3. Indikace naplnění sběrné nádoby (žlutá dióda)
4. Tlačítko vypnutí zvukové indikace

Separátor amalgámu Metasys Compact Dynamic zabezpečuje separaci amalgámu. Kompletní informace najdete v samostatném návodu k použití.

Při výměně a likvidaci plné sběrné nádoby s amalgámem postupujte podle návodu k použití separátoru amalgámu Metasys Compact Dynamic. Sběrná nádoba je přístupná po otevření dvířek plivátkového bloku.

8.8.3. Ovládací panel separátoru amalgámu Dürr CAS1

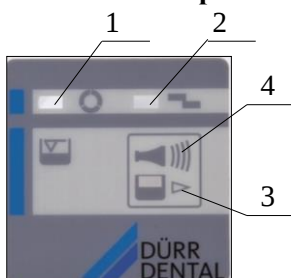

1. Provozní pohotovost (zelená dióda)
2. Porucha zařízení (oranžová dióda)
3. Indikace naplnění nádoby (žlutá dióda)
4. Tlačítko vypnutí zvukové indikace

Separátor amalgámu Dürr CAS1 zabezpečuje separaci amalgámu. Kompletní informace najdete v samostatném návodu k použití.

Při výměně a likvidaci plné sběrné nádoby s amalgámem postupujte podle návodu k použití separátoru amalgámu Dürr CAS1. Sběrná nádoba je přístupná po otevření dvířek plivátkového bloku.

8.9. Plnění lahví pro čistou vodu a dezinfekční prostředek

Čistá voda z láhve je přivedená do mikromotorů, turbínových násadů, ostraňovačů zubního kamene a stříkaček na stolek lékaře a stolek asistenta. Používá se na chlazení nástrojů.

Dezinfekční roztok je po dobu dezinfekčního cyklu přiváděn do nástrojů, které byly uloženy do dezinfekčního držáku.

Flašky pro čistou vodu a dezinfekční roztok jsou umístěny tak, že je možné vizuálně kontrolovat hladinu náplně. V případě vyčerpání čisté vody anebo dezinfekčního roztoku je potřebné láhve znova naplnit.



Před plněním lahví odtlakujte flašky propnutím odvětrávacího ventilu směrem k flašce. Ventil propněte zpět potáhnutím k sobě až po našroubování lahví na jejich původní místo.


Flašky s čistou vodou a dezinfekčním prostředkem jsou přišroubované k plivátlovému bloku. Pro odnětí flašky otáčejte flašku doleva.



Při plnění lahví dbejte na to, aby se do lahví nedostaly cizí látky, které by mohly ovlivnit složení a kvalitu čisté vody anebo dezinfekčního prostředku. Flašky plnit max. objemem 1 litr /objem flašky 1,25 litru/. Flašku uchopte zespodu, nestiskněte a nasadte pravotočivým pohybem.



Jako čistou vodu používejte destilovanou vodu. Nikdy nepoužívejte demineralizovanou vodu pro technické účely.

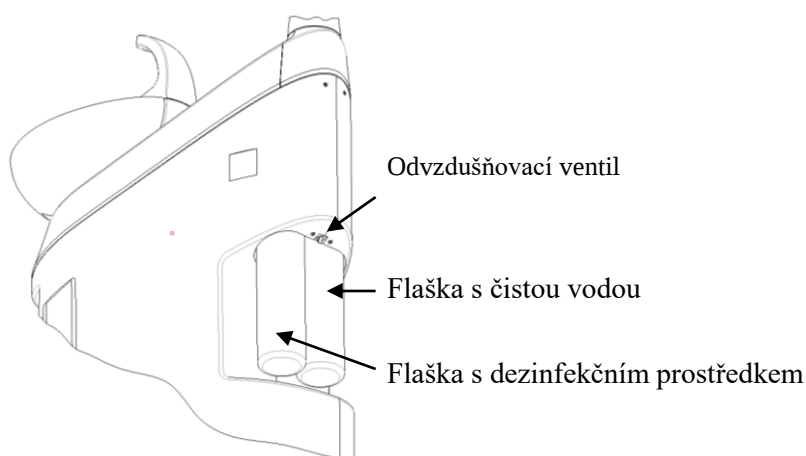

8.10. Popis akustických upozornění

akustický signál	příznaky a odstranění	poznámka
Po zdvihnutí nástroje z držáku se ozve akustický signál a současně bliká indikace na displeji	Daný nástroj potřebuje ošetřit olejovým sprejem. Po ošetření stlačte  tlačítko a držte ho stlačené 3s (ozve se akustický signál)	Signalizace pro daný nástroj je možné natrvalo vypnout:  3s &  resp. opět zapnout:  3s &  viz kap. 8.4.2.
Při pohybu křesla se ozvou tři akustické signály	Došlo k sepnutí bezpečnostního spínače. Odstraňte překážku, která brání v pohybu křesla anebo opěradla směrem dolů.	
Při pohybu křesla se ozvou dva akustické signály	Plivátková mísa je otočená do prostoru křesla. Otočte mísu mimo prostor křesla.	

9. Údržba výrobku

9.1. Údržba obsluhujícím personálem




VÝSTRAHA

Používejte při této práci rukavice !



Obsluhující personál musí:

- Před začátkem práce propláchnout a profouknout hadice nástrojů (bez nástrojů) spuštěním nástroje se zapnutým chlazením a propláchnout plnič poháru s oplachem mísy spuštěním plnění poháru.
- Před a po delším přerušení práce (víkend, dovolená) spustit dezinfekční cyklus a propláchnout plnič poháru s oplachem mísy spuštěním plnění poháru. Když souprava neobsahuje dezinfekci nástrojových hadic, propláchnout a profouknout hadice nástrojů (bez nástrojů) spuštěním nástroje se zapnutým chlazením a propláchnout plnič poháru s oplachem mísy spuštěním plnění poháru.
- 2x – 3x denně kontrolovat stav a čistotu zachytávače v plivátkové míse a podle potřeby ho očistit, anebo vyměnit – viz obr. v kap. 4.1.3.1.
- 2x – 3x denně pročistit hadici odsliňovače a odsávačky propláchnutím čistou vodou min. 0,5 l.
- 2x – 3x denně vyčistit sítko v koncovce odsliňovače, (ejektorové odsávání)

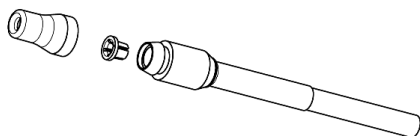


- 2x denně a po každém chirurgickém ošetření propláchnout separátor amalgámu dezinfekčním prostředkem předepsaný výrobcem separátoru amalgámu.
- 1x denně vyčistit filtr odsávacích hadic viz obr.níže.
- 1x denně po práci spustit čištění plivátkového ventilu Dürr MSBV stlačením tlačítka na ovládacím panelu plivátkového ventilu Dürr MSBV viz obr. v kap. 8.8.1.
- 1x denně po práci vyčistit filtr plivátkového ventilu Dürr MSBV viz obr. níže.
- 1x měsíčně vyčistit běžným saponátovým prostředkem vložku zachytávače oleje - viz obrázek v kap. 8.5.2.
- 1x za 6 měsíců vyměňte láhev na čistou vodu a láhev na dezinfekční prostředek. Pokud si však všimnete opotřebování, poškrábání, změnu barvy, průhlednosti, deformace nebo jiné poškození, láhev okamžitě nahraďte za novou.

Čištění filtru odsávacích hadic :

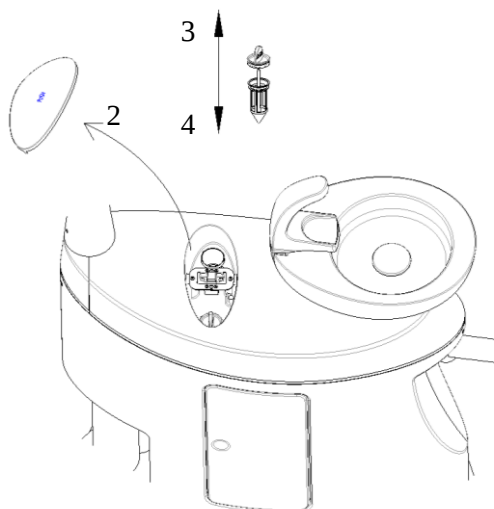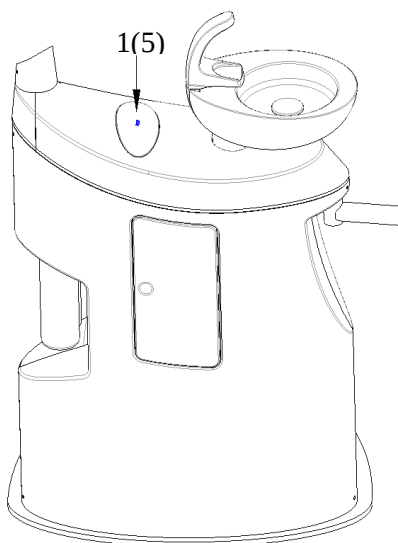

1. Stlačením uvolněte kryt
2. Vyberte kryt filtru
3. Vyberte a vyčistěte filtr
4. Vložte filtr nazpět
5. Vložte kryt filtru a jemně ho zatlačte

Čištění filtru plivátkového ventila Dürr MSBV :

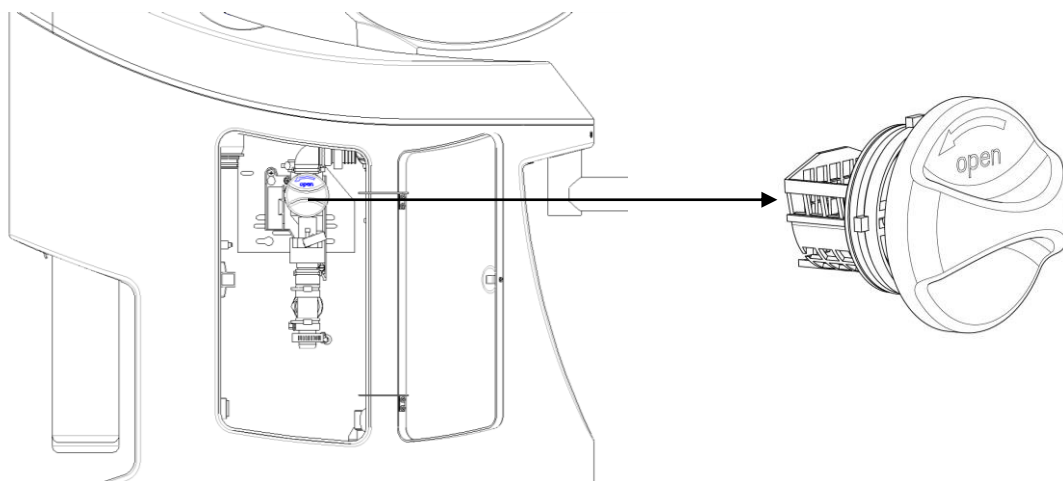

1. Stlačením uvolněte dvířka v plivátlovém bloku a otevřete je
2. Vyberte a vyčistěte filtr
3. Vložte filtr na původní místo
4. Zavřete dvířka v plivátlovém bloku a jemně je zatlačte

Další údržba přístroje obsluhujícím personálem se omezuje jen na čištění přístroje a sterilizaci sterilizovatelných částí.

Údržbu, čištění a sterilizaci nástrojů (mikromotor, turbínový násadec, mikromotorické násadce) vykonávejte podle návodů výrobců nástrojů.

Chemické látky je nutné odkládat jen na tácek tray stolku. Při náhodném kápnutí chemické látky např. Trikresol, Chlumského roztok a jiné agresivní látky na lakovanou část přístroje, je nutné povrch okamžitě utřít tampónem namočeným ve vodě.

10. Čištění, dezinfekce a sterilizace

Čištění přístroje (plivátkový blok, stolek, ramena, nožní spínač) se dělá vlhkou utěrkou, nehořlavými čistícími prostředky, přičemž je potřebné dbát na to, aby voda nevnikla do přístroje. Všechny části přístroje se důkladně vytřou a vyleští suchou flanelovou utěrkou.

- Koženka křesla se doporučuje čistit jemným kartáčkem vlažnou mýdlovou vodou, případně čistícím prostředkem Ferrari Clean, anebo Incidin Foam.
- Plivátková mísa a odsávací prvky (odsliňovač, odsávačka) doporučujeme čistit 2x denně, např. prostředkem Dürr Orotol nebo Metasys Green and Clean MB a M2



VÝSTRAHA

Nepoužívejte žádné agresivní, anebo silně pěnicí prostředky, protože tyto mohou vést k poruchám funkce odsávání. Nedovolené jsou rozpouštědla /např. acetón a pod./ a prostředky na bázi fenolů a aldehydů. Nedovolené jsou i všechny abrazivní prostředky.

Vodní cesty nástrojových hadic doporučujeme dezinfikovat kontinuálně dezinfekčním prostředkem na kontinuální dezinfekci (dekontaminaci) vodních cest dentálních zařízení (např. Alpron od firmy Alpro). Do láhve pro čistou vodu (volitelné vybavení) – kap. 8.9. naředíte roztok dezinfekčního prostředku pro kontinuální dezinfekci (dekontaminaci) vodních cest dentálních zařízení naředěným dle pokynů jeho výrobce.

Během dlouhodobé odstávky stomatologické soupravy doporučujeme provést dezinfekci (dekontaminaci) dezinfekčním prostředkem na dekontaminaci vodních cest dentálních zařízení (např. Bilpron od firmy Alpro) zapnutím dezinfekčního cyklu – viz. kap. 8.5.7. (volitelné vybavení).



VÝSTRAHA

Používejte výhradně dezinfekční prostředky pro vodní cesty dentálních zařízení. Dodržujte pokyny a datum spotřeby uvedený na etiketě láhve s dezinfekčním prostředkem.

Sterilizovat v autoklávech se mohou:

- trysky stříkaček
- turbínové násadce
- mikromotorické násadce



VÝSTRAHA

Nástroje mají vlastní návody k použití s podmínkami sterilizace, které je nutné dodržovat. Ostatní části je možné dezinfikovat běžnými dezinfekčními prostředky s virucidním působením, které nezpůsobují korozi materiálu a nenarušují povrch.

11. Bezpečnostně technické kontroly

Bezpečnostně technické kontroly musí být vykonávány podle normy IEC 62 353 jednou za dva roky.

12. Doprava

Symbody vytisknuté na vnější straně obalu platí pro dopravu a skladování a mají následující význam:



křehké, opatrně zacházet



tím směrem nahoru (svislá poloha nákladu)




chránit před vlhkem



recyklovatelný materiál



teplota přepravy, skladování

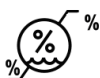

vlhkost skladování



omezené stohování

Přístroj je nutné přepravovat krytými dopravními prostředky bez větších otřesů při teplotě od -20°C do +50°C, relativní vlhkosti do 100%, přičemž nesmí být vystavený působení agresivních par. Přístroj musí být zabalený a přepravovaný v obalu /transportní bedně/, který je určený výhradně pro tyto účely.

13. Skladování

Přístroj musí být skladován v suchých místnostech s max. relat. vlhkostí 80% při teplotách od -5°C do +50°C, přičemž nesmí být vystavený působení agresivních par.

Při delším skladování jako 18 měsíců je nutné stomatologickou soupravu prozkoušet servisní organizací.

14. Likvidace přístroje

Životnost přístroje je 10 roků.



Po skončení životnosti, přístroj (nářadí) nesmí být likvidován s běžným odpadem.

Likviduje se s ostatním průmyslovým odpadem, t.j. odděleným sběrem.

Oddělený sběr a elektroodpad se odevzdává distributorovi, anebo zpracovateli odpadu pro opětovné použití, anebo recyklaci.

Sběr odpadu, t.j. přístroj anebo nářadí zabezpečují distributoři (smluvní servisní organizace, resp. smluvní servisní pracovníci), kteří přístroj (nářadí) odeberou od spotřebitele po vyčištění, předepsané dezinfekci i sterilizaci a odevzdají zpracovateli odpadu, který má souhlas pro nakládání s nebezpečným odpadem.

15. Údaje k elektromagnetické kompatibilitě podle STN EN 60 601-1-2

15.1. Elektromagnetické emise

Stomatologická souprava CHIRANA CHEESE L je určena pro provoz v níže uvedeném prostředí. Uživatel by měl zabezpečit, aby byl přístroj v takovém to prostředí provozován.

Rušivé emise	Funkční kritéria (třída)		Elektromagnetické prostředí
	shoda	požadované	
Vysokofrekvenční emise Měření rušivého pole na svorkách STN EN 55011 Měření intenzity rušivého pole STN EN 55011	A	B	Stomat. souprava CHIRANA CHEESE L je určena pro užívání ve všech zařízeních včetně obytných zón, které jsou připojené na veřejnou zásobovací síť a prostory, které jsou určeny k bydlení – úroveň odolnosti 2 STN EN 61 000-4
Nízkofrekvenční emise Proudová analýza IEC 61000-3-2 Kolísání napětí IEC 61000-3-3	A	B	
	A	B	Stomat. souprava CHIRANA CHEESE L je určena pro užívání ve všech zařízeních včetně obytných zón, které jsou připojené na veřejnou zásobovací síť a prostory, které jsou určeny k bydlení – úroveň odolnosti 2 STN EN 61 000-4

15.2. Elektromagnetická odolnost vůči rušení

Zkoušky odolnosti vůči rušení	STN EN 60 601-1-2 zkušební úroveň odolnosti	Shoda hladiny – kritérium	Elektromagnetické prostředí
Elektrostatický výboj	vzduchový výboj ± 2 kV, +/- 4 kV, +/- 8 kV Kontaktní výboj +/- 2 kV, +/- 4 kV, +/- 6 kV	A A	Podlahy ze dřeva, betonu, keramické dlaždice. Při podlaze ze syntetického materiálu musí být vlhkost vzduchu min. 30 %.
Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole	3 V/m 80 %, 1 kHz 80 MHz – 2,5 GHz horizontál detto vertikál	shoda	Doporučená ochranná vzdálenost pevnostních a mobilních rádiových přístrojů $d = 1,17\sqrt{p}$ pro 80 ÷ 800 MHz $d = 2,33\sqrt{p}$ pro 800 MHz ÷ 2,5 GHz p – maximální výkonost vysílače ve watttech (W) d – vzdálenost v m
Rychle přechodné jevy a skupiny impulzů	± 2 kV	shoda	Napětí by mělo odpovídat typickému nemocničnímu prostředí či prostředí v obchodech
Rázové impulzy	vedení proti zemi – úroveň $\pm 0,5$ kV, ± 1 kV, ± 2 kV	shoda splňuje A	Napětí by mělo odpovídat typickému nemocničnímu prostředí či prostředí

Zkoušky odolnosti vůči rušení	STN EN 60 601-1-2 zkušební úroveň odolnosti	Shoda hladiny – kritérium	Elektromagnetické prostředí
	vedení proti druhému vedení $\pm 0,5 \text{ kV}, \pm 1 \text{ kV}$		v obchodech
Odolnost proti rušení šířenému vedením (rušení indikované VF poli)	3 V 80 % 1 kHz 150 kHz ÷ 80 MHz	shoda	
Krátkodobé poklesy napětí, krátke přerušování a kolísání napětí	poklesy napájení: > 95 % poklesu 10 ms 30 % poklesu 500 ms 60 % poklesu 100 ms přerušování i > 95 % poklesu 5000 ms	shoda	Napětí odpovídá typickému nemocničnímu prostředí či prostředí v obchodech

**15.3. Doporučené ochranné vzdálenosti mezi mobilními vysokofrekvenčními
telekomunikačními přístroji a stomatologickou soupravou CHIRANA
CHEESE L**

Výkonnost vysílače v W	150 kHz až 80 MHz $d = 1,17\sqrt{p}$	80 MHz až 800 MHz $d = 1,17\sqrt{p}$	800 MHz až 2,5 GHz $d = 2,33\sqrt{p}$
0,01	0,1	0,1	0,2
0,1	0,4	0,4	0,7
1	1,2	1,2	2,3
10	3,7	3,7	7,4
100	11,7	11,7	23,3

d – v metrech

p – max. výkon vysílače ve wattech (W)

