


STOLIČKA SMILE 3

- Obsah krabice :
- podnož (kříž) s pěti kolečky (1)
 - plynová pružina (píst) (2)
 - kruhová podnož se šroubem (3)
 - opěrka SMILE 3 - komplet (4)
 - sedák SMILE 3 – komplet (5)

Návod k montáži a nastavení stoličky

1. Do podnože kříže (1) vložte plynovou pružinu (2)
2. Na horní konec pružiny (2) nasadte sedák s kuželovým otvorem v mechanice
3. Uvolněte plastový šroub M8x14 v opěrce SMILE 3 (3) a nasadte opěrku na mechanismus sedáku (5), nastavte opěradlo do zvolené polohy a zašroubujte ji.
4. Výšku sedáku měníme s pomocí páčky na pravé straně stoličky pod sedákem. Posunem páčky směrem nahoru se uvolní aretace plynové pružiny a zatížený sedák se pohybuje směrem dolů. Přenesením hmotnosti těla na chodidla odlehčíme sedák. Opětovným posunem páčky směrem nahoru se sedák tlakem plynové pružiny pohybuje nahoru.
5. Úhel naklonění opěradla se nastavuje s pomocí polohovacího kolečka vzadu na pravé straně stoličky pod sedákem. Pootočením kolečka doleva se uvolní pohyb opěradla. Po nastavení vhodného úhlu naklonění opěradla, utáhnutím kolečka pootočením doprava, nastavenou páku zafixujeme.
6. Nastavení výšky opěradla se ovládá zadním utahovacím kolečkem na zadní straně stoličky. Jeho pootočením doleva se zdvih uvolní, opěradlo posuneme nahoru, anebo dolů, a pootočením kolečka opěradla zafixujeme ve zvolené výšce.

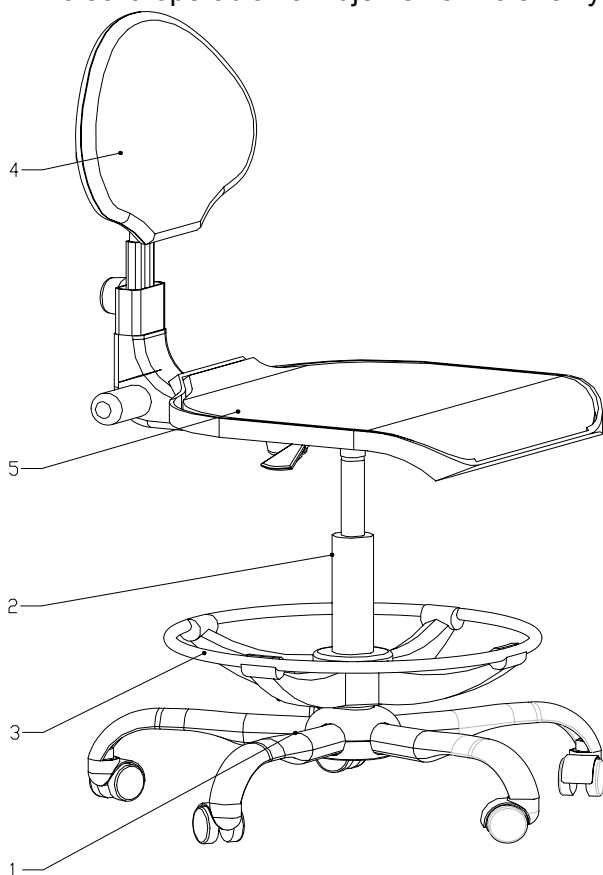

Pokyny k ošetřování stoličky :

1. Stoličku chraňte před nadměrným vlhkem, teplem a přímými slunečními paprsky.
2. Zabraňte narážení čalounění na ostré hrany okolních předmětů.
3. K čištění čalounění plastových a kovových částí používejte roztoky saponátů, vysušte je a případně vyleštěte. Nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivními částicemi. Nepoužívat organická rozpouštědla.

Upozornění :

1. Stolička je určena výhradně k sezení. Na otočnou stoličku nikdy nestoupejte, hrozí nebezpečí úrazu.
2. Plynovou pružinu nikdy nerozebírejte ani neohřívejte! Je pod stálým tlakem a při uvedených manipulacích hrozí nebezpečí úrazu !
3. Když nebudou dodrženy pokyny uvedené v tomto návodě, výrobce neručí za eventuální škody vzniklé neodbornou obsluhou, anebo ošetřováním stoličky.

Výrobek-Typ : STOLIČKA SMILE 3

CHIRANA

Název:

MEDICAL

Stará Turá

NÁVOD K POUŽITÍ

39

054

2730

721

5001

9

Likvidace přístroje

Po skončení životnosti, přístroj (náradí) nesmí být likvidován s běžným odpadem.

Likviduje se s ostatním průmyslovým odpadem, t.j. odděleným sběrem.

Oddělený sběr se odevzdává distributoru, anebo spracovateli odpadu k opakovanému použití, anebo recyklaci.

Sběr odpadu, t.j. přístroj anebo náradí zabezpečují distributoři (smluvní servisní organizace, resp. smluvní servisní pracovníci), kteří přístroj (náradí) odeberou od spotřebitele po vyčištění, předepsané dezinfekci i sterilizaci a odevzdají spracovateli odpadu, který má schválení k manipulaci s nebezpečným odpadem.

**CHIRANA Medical a.s., Stará Turá**

Nám. Dr. A. Schweitzera 194, P.O.Box 57, 916 01 Stará Turá, Slovenská republika

Tel. +421 32 775 2257


Fax. +421 32 775 2218, 775 3315

medical@chirana.eu, www.chirana.eu

datum poslední revize – leden 2013

**COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 13485 =**

CHIRANA - tradičná ochranná známka CHIRANY Medical,
Stará Turá. Vlastníkom registrovaných ochranných známk
CHIRANA je jej materská spoločnosť M.O.C., s.r.o.

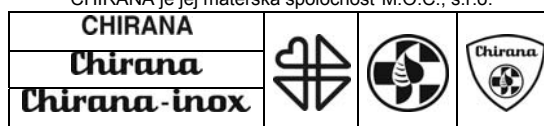

**CHIRANA
MEDICAL**
Stará Turá

Výrobek-Typ : STOLIČKA SMILE 3
Název:

NÁVOD K POUŽITÍ

39 054 2730 721 5001 9