





NÁVOD K POUŽITÍ


STOLIČKA SMILE 5

- Obsah krabice :
- podnož (kříž) s 5 kolečky (1)
 - plynová pružina (píst) (2)
 - kruhová podnož se šroubem (3)
 - opěrka SMILE 5 - komplet (4)
 - sedák SMILE 5 - komplet (5)
 - lama stoličky (6)

Návod k montáži a nastavení stoličky

1. Do podnože kříže (1) vložte plynovou pružinu (2), nasad'te kruhovou podnož (3) na doraz ke kříži.
2. Na horní konec pružiny (2) nasad'te sedák s kuželovým otvorem v mechanice.
3. Nasad'te lamu opěrky (6) na mechanismus (7) a přišroubujte 2x M8x20
4. Opěrku ruky (4) přišroubujte na lamu (6), nastavte opěradlo do zvolené polohy a zašroubujte ji.
5. Výšku sedáku měníme s pomocí páčky (8) na pravé straně stoličky pod sedákem. Posunem páčky směrem nahoru se uvolní aretace plynové pružiny, zatížený sedák se pohybuje směrem dolů a odlehčený sedák se pohybuje směrem nahoru.
6. Výška opěrky ruky se nastavuje s pomocí polohovacího kolečka (9) vzadu na opěrce ruky. Pootočením kolečka doleva se uvolní pohyb opěradla. Po nastavení vhodné výšky opěradla, utáhnutím kolečka pootočením doprava, nastavenou páku zafixujeme.

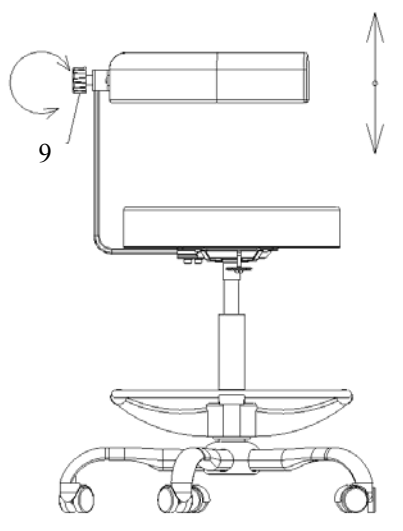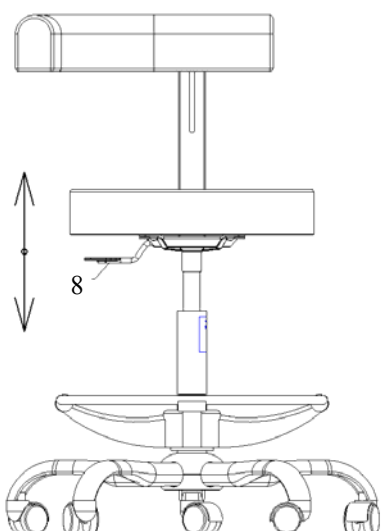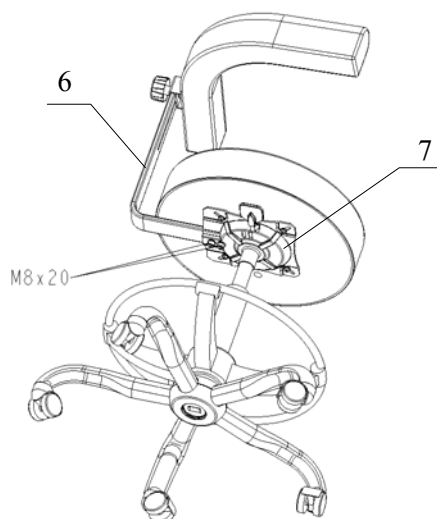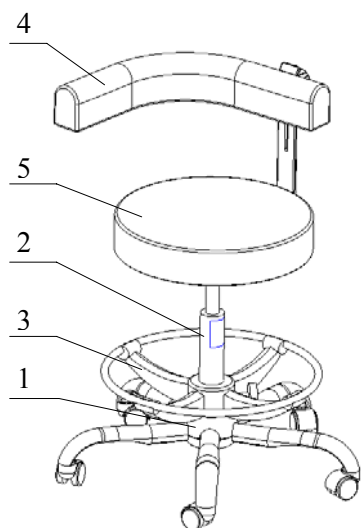

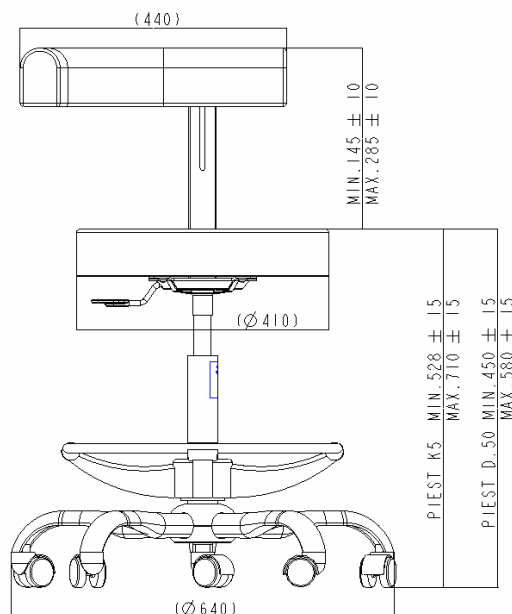

Pokyny k ošetřování stoličky :

1. Stoličku chraňte před nadměrným vlhkem, teplem a přímými slunečními paprsky.
2. Zabraňte narážení čalounění na ostré hrany okolních předmětů.
3. K čištění čalounění plastových a kovových částí používejte roztoky saponátů, vysušte ich a případně vyleštete. Nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivními částicemi. Nepoužívejte organická rozpouštědla.

Upozornění:

1. Stolička je určená výhradně k sezení. Na otočné stoličce nikdy nestůjte, hrozí nebezpečí úrazu.
2. Plynovou pružinu nikdy nerozkládejte ani neohřívejte! Je pod stálým tlakem a při uvedených manipulacích hrozí nebezpečí úrazu !

Pokud nebudou dodrženy pokyny v tomto návodu, výrobce neručí za eventuální škody vzniklé neodbornou obsluhou nebo ošetřováním stoličky.

Likvidace přístroje



Po skončení životnosti, přístroj (nástroje) nesmí být likvidován spolu s běžným odpadem.

Likviduje se s ostatním průmyslovým odpadem, t.j. odděleným sběrem.

Oddělený sběr se odevzdává distributoru nebo zpracovateli odpadu k opakovanému použití nebo k recyklaci. Sběr odpadu, t.j. přístroj nebo nástroje zabezpečují distributoři (smluvní servisní organizace, resp. smluvní servisní pracovníci), kteří přístroj (nástroje) převezmou od spotřebitele po jeho vyčištění, předepsané dezinfekci i sterilizaci a odevzdají zpracovateli odpadu, který má souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem.



CHIRANA Medical a.s., Stará Turá

Nám. Dr. A. Schweitzera 194, P.O.Box 57, 916 01 Stará Turá, Slovenská republika

Tel. +421 32 775 2257

Fax. +421 32 775 2218, 775 3315

medical@chirana.eu, www.chirana.eu

datum prvního vydání – červen 2013

**COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 13485 =**

CHIRANA - tradiční ochranná známka CHIRANY Medical a.s., Stará Turá. Vlastníkem registrovaných ochranných známek CHIRANA je její mateřská společnost M.O.C., s.r.o.

